

BLIMO

ANVÄNDARMANUAL - BLIMO X-950



1 Säkerhet

R7SM-PRO ska endast användas av en person som inte lider av något tillstånd som försämrar synen, hörseln, synförmågan eller förmågan att reagera på plötsliga förändringar i omgivningen. Om du lider av något av ovanstående rekommenderas att du rådfrågar din läkare innan du använder X-950.


- Kör endast över hinder och upp på trottoarkanter vid den lägsta punkten och i rät vinkel.
- Plötsliga svängar eller hastighetsförändringar rekommenderas inte.
- Undvik branta ytor om det finns risk för sladd på grund av isiga eller våta ytor.
- Undvik att köra på lösa underlag som grus.
- Kör alltid rakt uppför backar, dvs. kör inte i zickzack.
- Vänd inte X-950 på lutande underlag.
- Kör inte X-950 nedför trappor.
- Kör alltid framåt nedför lutningar, trottoarkanter och andra hinder.

1.1 Antivältningshjul

X-950 är utrustad med tippskyddshjul bak. Dessa är en säkerhetsanordning för nödsituationer som aldrig ska användas vid normal körning. De är utformade för att förhindra att X-950 tippar bakåt på branta sluttningar. Om du upptäcker några skador på hjulen ska du sluta använda scootern och ta den till en certifierad mekaniker som kan kontrollera att chassit inte har skadats.

1.2 Säkra lutningar

X-950 kan utan risk köra i uppförsbackar med en lutning på upp till 12° . I denna 12° lutning kan X stanna, bromsa och svänga. Det är möjligt att försöka köra i brantare backar, men vi rekommenderar starkt att du inte gör det. För att minska risken för att tippa bakåt i backar, minska belastningen på scooterns bakdel genom att skjuta fram sätet så långt som möjligt och luta dig framåt.

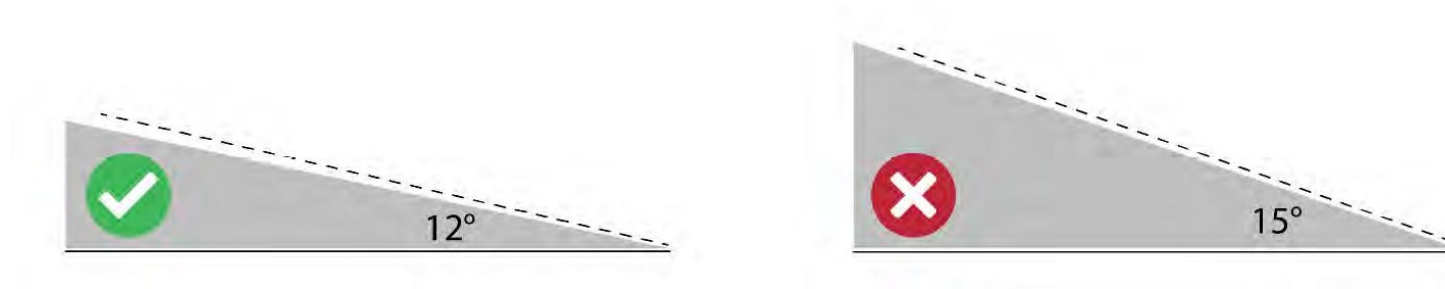

Figur 1 – Rekommenderade lutningar

2 Inledning

Din X-950 är en högteknologisk mobilitetsutrustning som kommer att ge dig många års trogen tjänst och glädje. Denna manual introducerar dig till drift, underhåll och skötsel av din X-950. Om du har några frågor eller är osäker på något, vänligen kontakta återförsäljaren där du ursprungligen köpte din X-950. Allt underhållsarbete ska utföras av en auktoriserad återförsäljare eller en certifierad mekaniker.

3 Din X-950

3.1 Avsedd användning

X-950 är avsedd för användning på jämna trottoarer eller vägar, i enlighet med lokala lagar. X-950 kan användas i vått och blåsiggt väder, men försiktighet bör iakttas när man planerar en resa i ogynnsamma väderförhållanden. Om det finns mer än 1 cm vatten på trottoaren bör extra försiktighet iakttas, eftersom scootern kan ha nedsatt grepp- och styrförmåga. Under inga omständigheter får mer än en person använda fordonet samtidigt.

3.2 Oavsiktlig rörelse


Innan du stiger på ska X-950 alltid vara stillastående. När X-950 slås på förblir den stillastående tills något av följande inträffar:

1. Framåt- eller bakåttreglaget dras.
2. Frihjulsfunktionen aktiveras.

Försök inte manövrera fordonet från utsidan.

Om fordonet är i rörelse kan en nödbromsning utföras genom att släppa gasreglagen och dra kraftigt i den handmanövrerade bromsspaken på styrstångens högra sida.

4 Digital styrstångsguide

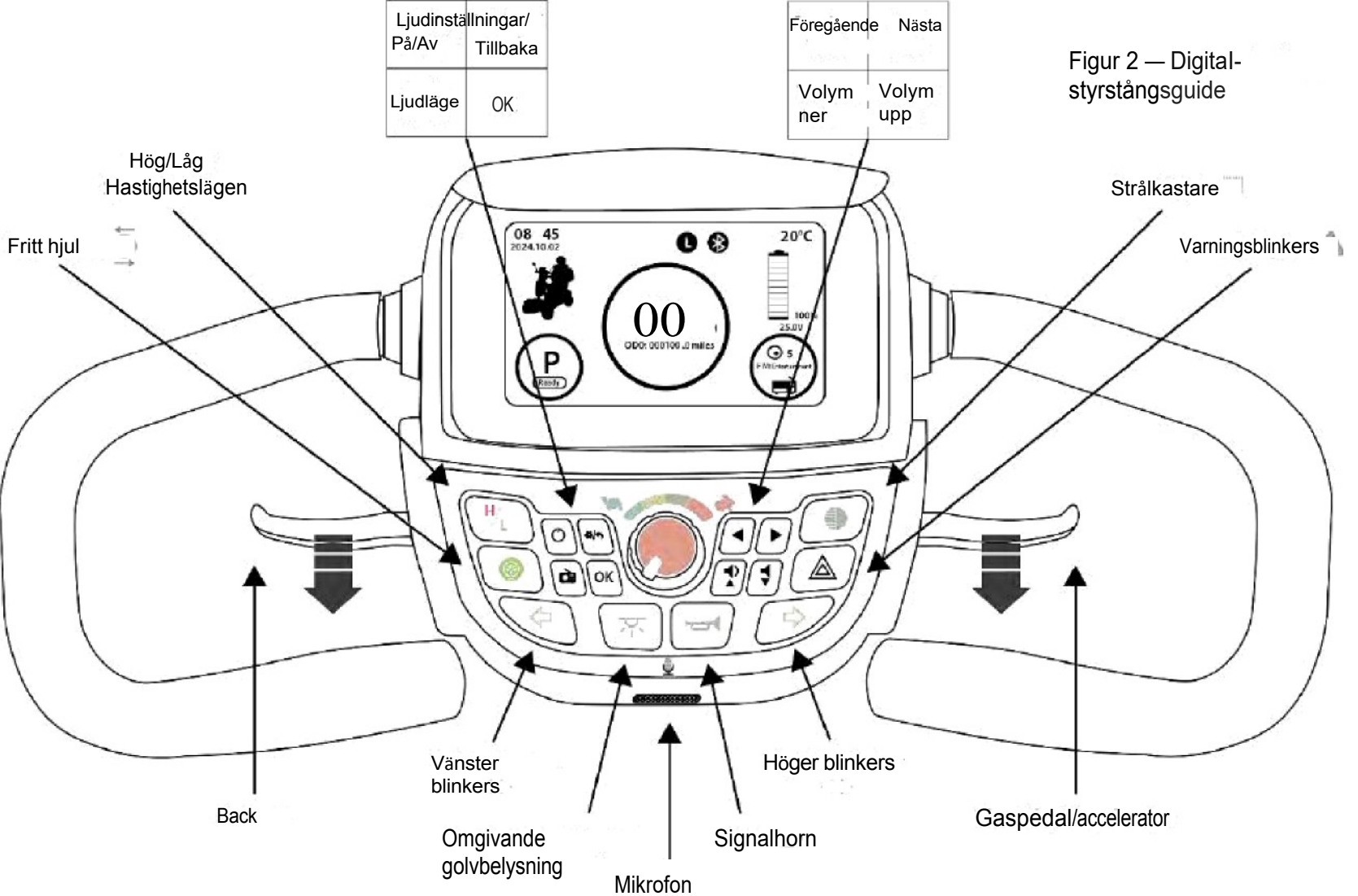

5 Användning av din X-950


5.1 Nycklar och fjärrkontroller

X-950 levereras med två nyckellösa fjärrkontroller:



**Nyckelbrickor
x2**

De nyckellösa fjärrkontrollerna fungerar inom en radie av 10 meter från skotern.

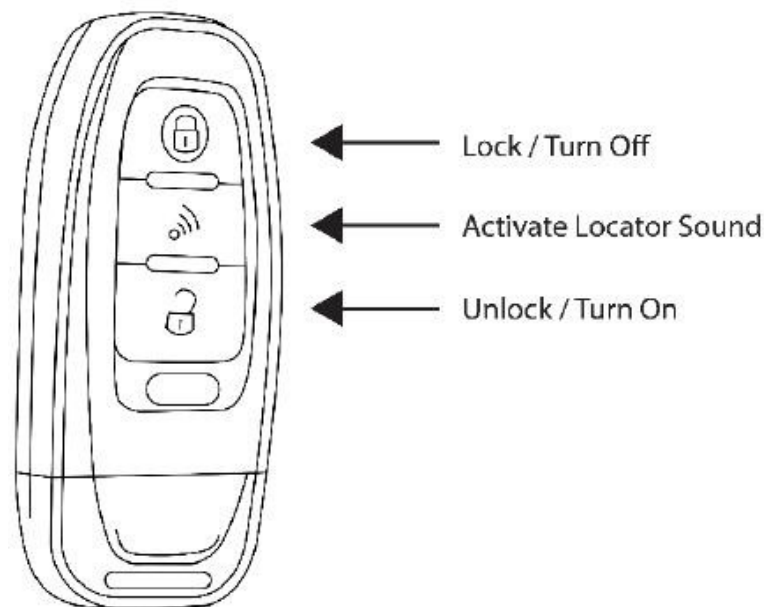

Starta

För att starta X-950, sätt dig i förarsätet och tryck antingen på knappen "Unlock/Turn On" på fjärrkontrollen eller på knappen "Start/Stop" på styrstången.

Stäng av

För att stänga av skotern trycker du på knappen "Lock/Turn Off" på fjärrkontrollen eller på knappen "Start/Stop" på styrstången.

Lokaliseringston

Om den nyckellösa fjärrkontrollen befinner sig inom räckvidden kan du använda den här funktionen för att lokalisera din skoter i en livlig miljö. När du trycker på knappen "Lokaliseringston" aktiveras ett högt ljud.

5.2 Sätjusteringar

Det är viktigt att justera sätet till en bra position som gör att du bekvämt kan manövrera alla fordonets reglage.

Framåt/bakåt


För att flytta sätet framåt eller bakåt, ta tag i den svarta spaken på höger sida under sätet medan du sitter ner.

Tryck hårt mot golvet med fötterna.


TOPPTIPS – Använd inte styrstången för att trycka eller dra dig upp.

Justering av ryggstödet

Sätets lutning kan ändras med hjälp av lyftspaken som sitter på höger sida av sätet när du sitter.

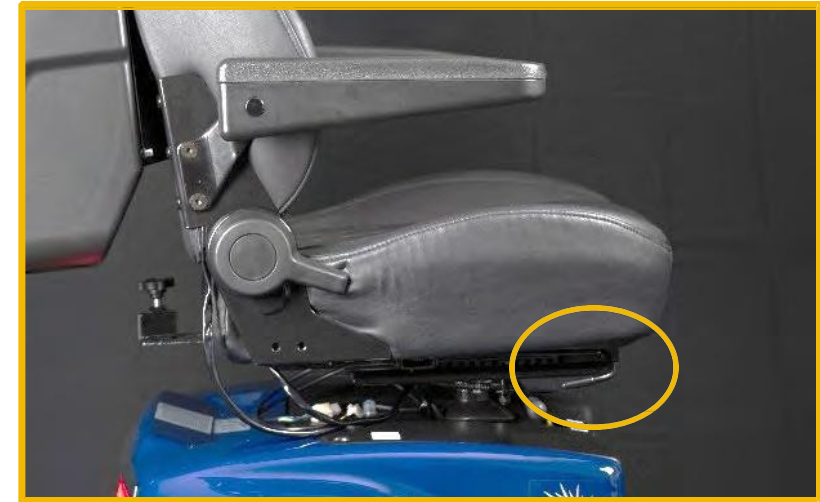

Figur 3 – Dra i den svarta spaken för att justera sittpositionen

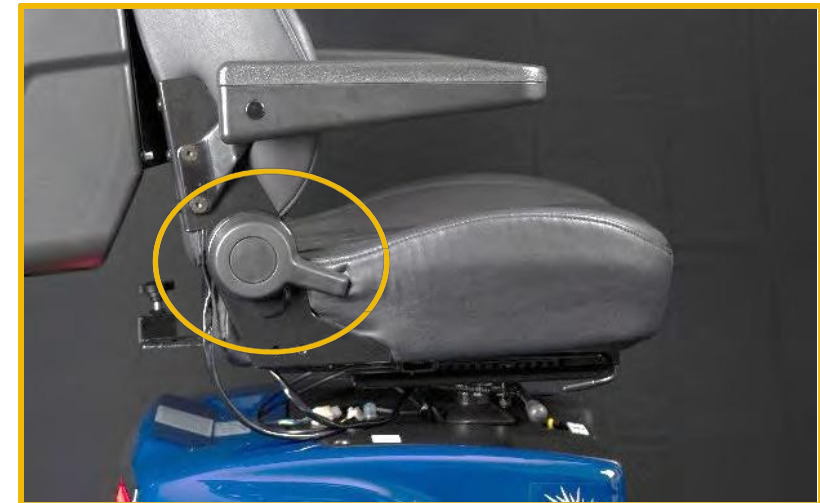

Figur 4 – Dra i det svarta handtaget för att justera ryggstödet

Justering av svängfunktionen

För att underlätta åtkomsten kan sätet vridas 90 grader.

För att ändra stolens vinkel, sätt dig på stolen, dra svänghandtaget mot scooterns framdel och vrid stolen moturs.



Figur 5 – Dra i det svarta handtaget för att justera ryggstödet

5.3 Justering av styret

Styrstångens vinkel kan justeras genom att trycka ner spaken på styrstångens framsida.

Hela rorkultenheten kan sedan lutas framåt och bakåt för att hitta en bekväm körposition. Släpp spaken för att låsa din önskade position.

Tänk på att om du sänker styrstången för mycket kan det bli svårt att styra.

Försök att hitta en position som ger god sikt över den digitala kontrollpanelen och möjliggör full rörelse åt vänster och höger.



5.4 Styrning

X-950 är utrustad med en mekanisk rattstång som helst ska manövreras med båda händerna. När X-950 står stilla kan styrningen kännas lite tung eller trög. Styrningen blir lättare när fordonet är i rörelse.

För mest exakt styrning bör X-950 röra sig framåt eller bakåt med en kontrollerbar hastighet. Tryck försiktigt ena sidan av styrstången bort från dig så att X-950 börjar svänga. Se till att du hela tiden observerar din omgivning under alla manövrer.

5.5 Acceleration och bromsning

5.5.1 Hastighetskontroller

X-950 har flera metoder för att kontrollera hastigheten: hög- och låghastighetslägen samt maxhastighetsbegränsare.

5.5.1.1 Hög- och låghastighetslägen

Lägena för hög hastighet (H) och låg hastighet (L) styrs med H/L-knappen.

5.5.1.2 Maxhastighetsbegränsare

Den röda ratten styr hastigheten som du vill att scootern ska köra i eller anpassar din hastighet till någon som går. Denna funktion är särskilt användbar när du kör scootern i trånga utrymmen.

Vrid ratten medurs för att köra snabbare och moturs för att köra långsammare.



Figur 7 – H/L-hastighetslägeskontroll



Figur 8 – Begränsare för maximal hastighet

5.5.1.3 Gashandtag

Acceleration och retardation styrs med de röda och gröna spakarna på styret. De är utformade för att förhindra att både framåt- och bakåtfunktionerna aktiveras samtidigt.

För att köra framåt drar du försiktigt i det gröna spakhandtaget. X-950 accelererar upp till den maximala tillåtna hastigheten som ställts in med hastighetsreglagen. För att sakta ner eller stanna släpper du gasreglaget så stannar scootern. I en nödsituation kan handbromsen aktiveras genom att dra i bromshandtaget som sitter till höger om styret.

Backläget kan aktiveras genom att dra i den röda spaken när scootern står stilla. För mer information om backläget, se 5.5.3 Backning.

5.5.2 Friläge

Du kan behöva flytta X-950 utan att motorn är igång. Detta gör du genom att hålla knappen "Freewheel" intryckt. Scootern måste vara påslagen och den digitala displayen tänd.

Håll knappen märkt med denna symbol intryckt:



Släpp knappen för att återaktivera bromsarna:

För din egen säkerhet ska du endast använda denna funktion på plan yta. I frirullningsläge måste du vara försiktig när du manövrerar scootern, eftersom det inte finns någon bromsfunktion.

TOPPTIPS – I frirullningsläge fortsätter scootern att rulla om den skjuts.

5.5.3 Backning

För att aktivera backläget, se till att X-950 står stilla på jämn mark. Innan du kör, kontrollera att området är fritt från hinder och att den planerade vägen är tillräckligt stor.

Dra försiktigt i den röda spaken så börjar X-950 sakta backa. För att sakta ner eller stanna, släpp den röda spaken så stannar scootern. I en nödsituation kan handbromsen aktiveras genom att dra i bromshandtaget som sitter till höger om styret.

5.6 Starta X-950

X-950 kan startas när nyckelbrickan befinner sig i närheten av scootern och start-/stoppknappen trycks in (figur 9).

X-950 är påslagen och klar att användas efter välkomstskärmen och när den digitala färgskärmen visar visuell data (figur 10).




Figur 9 – Start-/stoppknapp



Figur 10 – Digital instrumentpanel som visar data

5.7 Digital färgdisplay

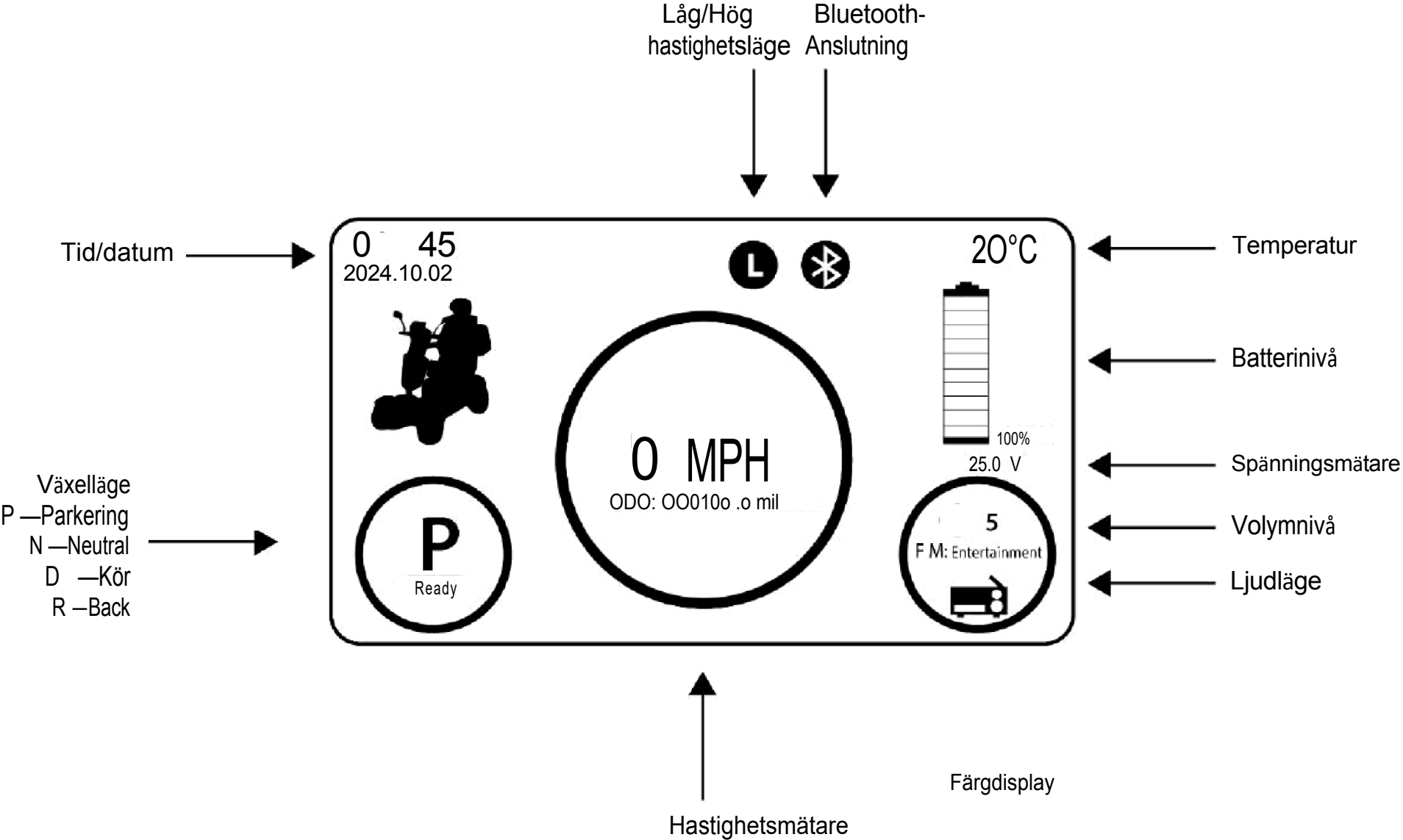

5.7.1 Trippmätare

De mil som visas på den digitala färgdisplayen är ackumulerade och representerar den totala sträckan som skotern har kört.

5.7.2 Ställa in datum och tid

Följ instruktionerna nedan för att ställa in klockan:

1. Håll inställnings-/bakåtknappen intryckt i tre sekunder.
2. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "System", tryck på OK-knappen.
3. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "Lokal inställning", tryck två gånger på OK-knappen.
4. Tryck på nedåtknappen ▼ och markera "Tid och datum", tryck på OK-knappen.
5. Använd nedåtknappen ▼ för att välja år, månad, dag, timme eller minut och tryck på OK-knappen
6. Använd knapparna ▼ för att justera inställningen.
7. Tryck på OK-knappen ▲ ▼ för att bekräfta inställningen.
8. Upprepa vid behov steg 5–7 för att ställa in år, månad, dag, timme eller minut och justera.
9. Tryck på knappen Inställningar/Tillbaka för att återgå till huvuddisplayen.
10. Datum och tid är nu inställda.

5.8 Indikatorer

Indikatorerna är ljusa orangefärgade lysdioder som är lätta att se.

För att slå på dem, tryck en gång på antingen vänster- eller höger- knappen innan du påbörjar en manöver. När svängen är klar och det är säkert att göra det, tryck på blinkersknappen igen för att stänga av blinkers.

5.9 Varningsblinkers

I en nödsituation kan båda blinkersaktiveras samtidigt genom att trycka på blinkers fram och bak tills knappen trycks in igen.



. Då blinkar både vänster och höger

5.10 Signalhorn


Det elektriska tutan aktiveras genom att trycka på knappen  på styrets ovansida. Tutan ska endast användas i enlighet med trafikreglerna. Tutan ljuder endast om scootern är påslagen.

5.11 Bluetooth


X-950 har integrerad Bluetooth-anslutning och två högtalare inbyggda i styrstången. Mobila enheter kan

kopplas ihop med scootern för att spela musik och ljud:

1. Slå på scootern och Bluetooth på din mobila enhet
2. Navigera till Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet
3. Välj enheten med namnet "scooter" (se figur 13)
4. Ange pinkoden "0000" och anslut
5. När anslutningen är klar visas Bluetooth-ikonen på displayen (se figur 12)
6. För att spela upp ljud, navigera till din mobila enhets ljudapp och tryck på Spela
7. Justera volymen med knapparna Volym upp/Volym ned (se figur 2).
8. Hoppa till nästa eller föregående spår genom att trycka på vänster- och högerknapparna

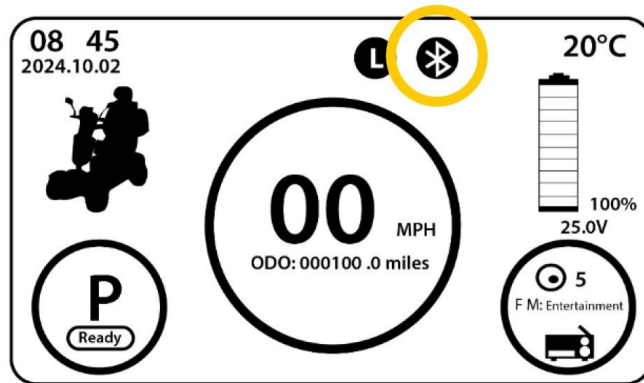

Figur 12 – Bluetooth-anslutning aktiv

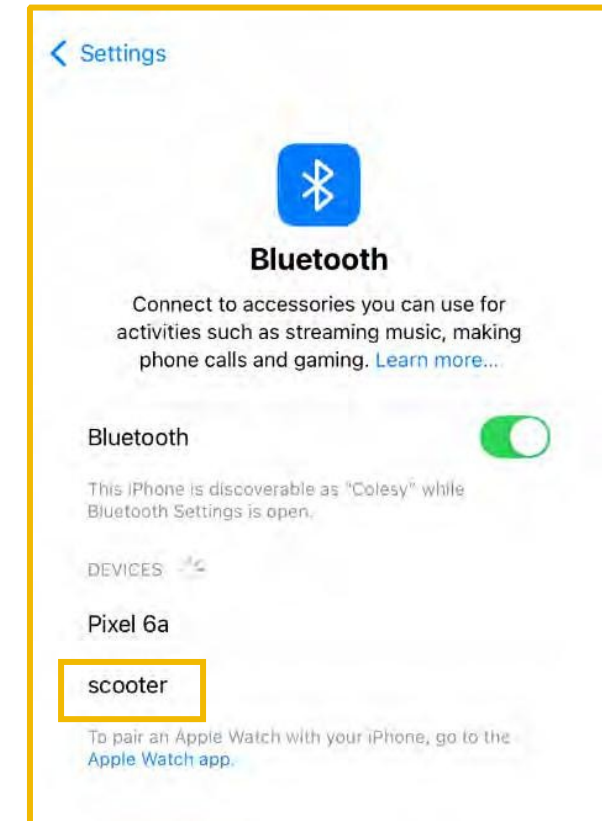

Figur 13 – Bluetooth-telefoninställningar

5.12 Skärmspeglning

X-950 Digital Colour Display kan spegla skärmen från din mobila enhet (Android eller iOS). För att spegla

skärmen från din mobiltelefon, följ instruktionerna nedan:

1. Slå på X-950 och anslut din mobiltelefon till scootern via Bluetooth (se 5.11)
2. Ladda ner EYLINK-appen från din mobiltelefons App Store (se figur 14).
3. Öppna EYLINK-appen och välj "Logga in med Apple" eller "Logga in med Google".
4. Ge appen tillgång till alla begärda behörigheter: plats, media, mikrofon, Bluetooth och aviseringar.
5. Välj enheten från listan som börjar med "EDG" eller tryck på "Anslut till instrumentpanelen".
6. När du blir ombedd, anslut till Wi-Fi-nätverket "iteAP" och vänta på anslutningen.
7. Tryck på "Skärmspeglning", tryck på "Starta skärmspeglning" och tryck på "Starta sändning".
8. Mobiltelefonens skärm speglas på scooterens digitala färgdisplay.
9. Öppna den mobilapp du vill visa, t.ex. ljudspelare eller navigering.
10. Om du lutar telefonen i liggande läge kommer den digitala färgdisplayen att orienteras i liggande läge.
11. Sätt in din mobiltelefon upp och ner i skoterns mobiltelefonhållare.

TOPPTIPS – Sätt in telefonen upp och ner i hållaren.


Om du sätter in den på rätt sätt roteras den digitala färgskärmen till stående läge.

För att sluta spegla skärmen från din mobiltelefon följer du instruktionerna nedan:

1. Gå till EYLINK-appen och tryck på "Avsluta skärmspeglning".
2. Den digitala färgskärmen återgår till driftskärmen.



Figur 14 – EYLINK-appens ikon

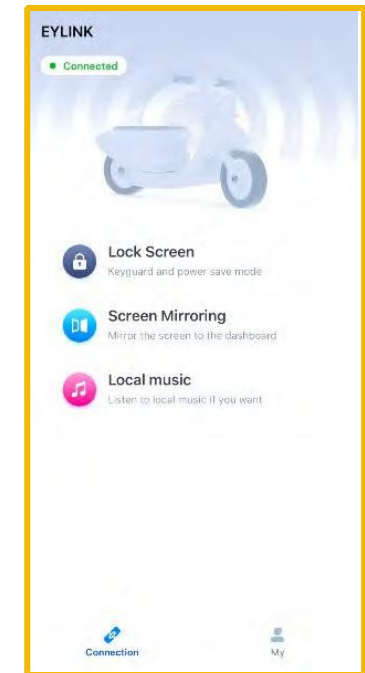

Figur 15 – EYLINK-appen

6.13 USB-laddningsportar

X-950 är utrustad med USB-laddningsportar på höger sida av rattstängan. **Port 1** sitter bredvid


LED-lampan och **port 2** finns på höger sida.

USB-port 1: Endast dataport

Denna port kan användas för att spela upp ljudfiler från USB-minnen.

USB-port 2: Endast laddningsport

Denna port kan användas för att ladda mobiltelefoner och surfplattor.

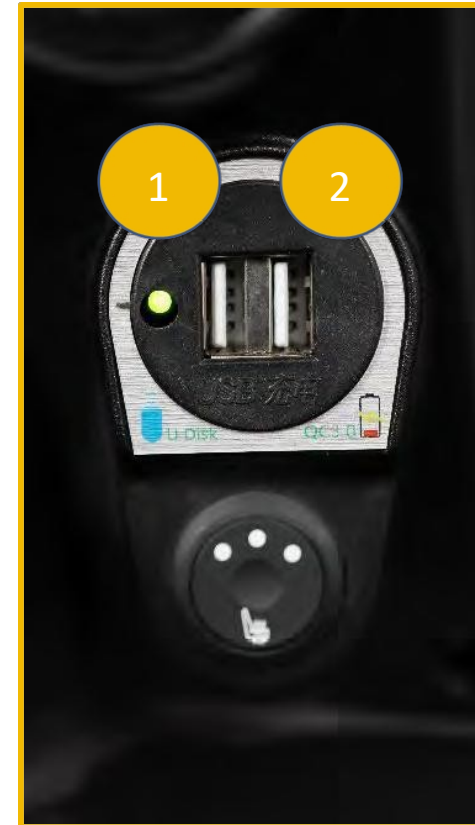

Figur 16 – USB-laddningsportar

6.14 Flask- och mobiltelefonhållare

För din bekvämlighet är X-950 utrustad med två formgjutna plastfästen. Använd dessa för att säkert förvara flaskdrycker och din mobiltelefon.

TOPPTIPS – Flaskhållaren ska inte användas för att förvara alkoholhaltiga drycker.



Figur 17 – Kopphållare och mobiltelefonhållare monterade på rattstången

6.15 Väskhållare

Det finns en praktisk väskhållare integrerad i scooterns styrstång. Denna hållare kan användas för att förvara din personliga väska eller dina inköp.

För att komma åt klämman trycker du på hållarens undersida så skjuts klämman mot dig. Påshållaren klarar en **maximal vikt på 2,5 kg**.



Figur 18 – Påshållare

6.16 Laddningsport

X-950 kan laddas via laddningsporten på styrstången.

Porten sitter på styrstångens högra sida. För att ladda fordonet ansluter du bara den medföljande laddningskabeln till porten.

När X-950 är i laddningsläge går den inte in i körläge.

TOPPTIPS – För bästa resultat, se till att ladda batterierna efter varje användning. Du kan inte överladda dem eftersom laddaren stängs av automatiskt när den känner av att de är fulla.

Om du inte använder din scooter under en längre period rekommenderar vi att du laddar batterierna minst en gång i veckan.

Detta säkerställer att de förblir i gott skick och är redo för regelbunden användning.



Figur 19 – Laddningsport monterad på styret

7 Underhåll

7.1 Byta glödlampor

LED-lampor är energieffektiva och har lång livslängd, men kan så småningom behöva bytas ut. LED-lampor kan köpas från återförsäljaren som levererade din X-950. Byte av lampor bör endast utföras av en auktoriserad återförsäljare, eftersom det innebär demontering av enheter som måste återförslutas enligt de ursprungliga tillverkningsspecifikationerna.

7.2 Batterivård

För att komma åt batterierna måste sätet tas bort. Innan du tar bort sätet ska du koppla bort båda anslutningarna till det uppvärmda sätet. För att ta bort sätet, ta tag i den svarta spaken på höger sida under sätet och dra den mot fordonets framsida. Sätet kan sedan tas bort genom att dra det rakt uppåt.

Batterierna i din X-950 bör inte kräva något dagligt underhåll, men det kan hända att du behöver komma åt dem. Batterierna sitter under sätet, skyddade av en svart plastkåpa som är fastsatt med sex skruvar.


När underhållet är klart, se till att skruvarna används för att sätta tillbaka batteriluckan ordentligt. Sätt tillbaka sätet och se till att det är låst på plats.

7.3 Säkringar

Säkringarna som används på X-950 är tillgängliga via en täckt lucka på framsidan av styrstången. För att komma åt säkringspanelen drar du bara ner fästklämman och skjuter bort locket. Säkringar bör endast bytas av professionella, eftersom felaktigt arbete kan skada det elektriska systemet.



**Figur 21 –
Säkringsboxens
placering**

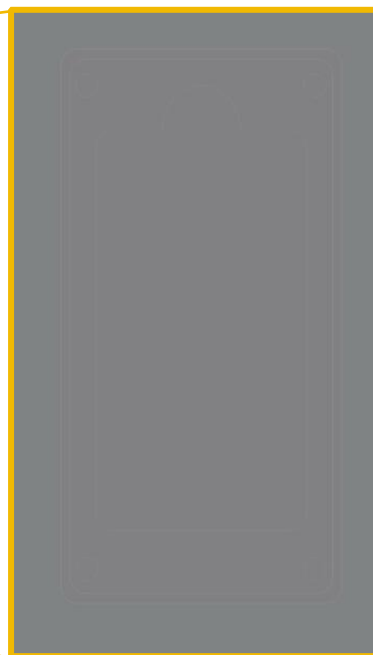

Figur 22 – Säkringstavlans lock

7.4 Däcktryck

Däcken på X-950 är konstruerade för att ge en bra balans mellan komfort och energieffektivitet. Felaktigt pumpade däck kan leda till dålig hantering, minskad räckvidd och ökat slitage. Däcken ska alltid ha minst 3 mm mönsterdjup för att ge tillräckligt grepp på vägytan. Om däcken blir slitna ska de bytas ut innan X-950 används igen.

Däcktryck fram: 35 psi

Däcktryck bak: 35 psi

7.5 Rengöring och underhåll

7.5.1 Gummimattor

Gummimattan ska rengöras med en dammsugare med en möbelborste. För fläckar kan en mild blandning av möbelrengöringsmedel och vatten användas, men se till att området torkas ordentligt efteråt.

TOPPTIPS – Använd inte blekmedel.

7.5.2 Lack

För att ta hand om lacken ska du regelbundet tvätta X-950 med mjuka trasor och ett mildt bilschampo. Applicera bilpolish för att få en högblank yta. Det rekommenderas starkt att polish appliceras på områden där lacken kan utsättas för ogynnsamma väderförhållanden.

TOPPTIPS – Använd aldrig kokande vatten för att rengöra X-950.

8 Garanti

R7SM-PRO levereras med 12 månaders tillverkargaranti när den köps ny från en auktoriserad återförsäljare. Under garantiperioden repareras alla delar som blir defekta på grund av tillverknings- eller materialfel av den återförsäljare där produkten köptes. Om reparationen inte kan genomföras byts delen ut mot en ny.

Om ett tillverkningsfel upptäcks måste detta rapporteras skriftligen till den återförsäljare där R7SM-PRO köptes inom 28 dagar efter köpet.

Produkter som anses ha en begränsad livslängd, inklusive batterier och däck, täcks inte av garantin om de anses ha utsatts för överdriven slitage eller felaktig användning.

Garantin täcker inte skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten, eftermarknadsmodificeringar eller oavsiktliga skador. Garantin är inte överlåtbar.

Garantin omfattar inte följdkostnader som uppstår till följd av felavhjälpning, frakt- och resekostnader, förlorad inkomst, utgifter etc.

Tillverkaren tar inte ansvar för skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna i denna bruksanvisning.

9 Specifikationer

9.1 Tekniska specifikationer

Motor	Bakhjulsdrift, förseglad transaxel 950 W (4- polig) 24 volt likström	Batterier	Dubbla 12 V 75 Ah eller 55 Ah
Instrumentpanel	Digital färgdisplay 16- knapps styrspak Max hastighet	Däck	Pneumatiska

9.2 Storlekar och vikter

Längd	1440 mm
Bredd	735 mm
Höjd	1350 mm
Motoreffekt	950 W
Styrenhet	PG120A
Bromsar	Elektromagnetiska/hydrauliska
Vikt	114 kg (utan batterier)
Viktkapacitet	220 kg
Markfrigång	155 mm (utan last)
Däck	13 tum pneumatiska däck
Hjul	8 tum legeringsfälgar
Maximal lutning	12 grader
Vändradie	2100 mm

1 Internationella hastigheter: Tillgängliga beroende på jurisdiktion och lokal lagstiftning.

2 Räckvidden kan variera beroende på batteriets laddning/skick/tillval, terrängtyp, däckens skick och fordonets last.

3 På grund av tillverkningstoleranser och kontinuerlig produktförbättring kan denna specifikation variera med +/-3 %.

4 Varierar beroende på användarens vikt, terrängtyp, batteriladdning, batteriets skick och däckens skick.