

VEDLEGG I – SPESIFIKASJON

1. Varierer med brukerens vekt, terrengtype, batteriets ampere-time (Ah), batteriets ladning, batteriets tilstand, dekktype og dekkets tilstand. Denne spesifikasjonen kan variere med (+ eller -) 10 %.

2. På grunn av produksjonstoleranser og kontinuerlig produktforbedring kan denne spesifikasjonen variere med (+ eller -) 3 %.

3. Omtrentlige totale dimensjoner når dekket er oppblåst.

4.

5. Testet i samsvar med ASN/RESNA, WC Vol 2, seksjon 4 og ISO 7176-4-standarder. Resultateravledet fra teoretisk beregning basert på batterispesifikasjoner og drivsystemets ytelse. Test utført ved maksimal vektkapasitet.

MERK: Dette produktet oppfyller alle gjeldende ANSL-RESNA-testkrav og ISO 7176 EN12184-standarder. Alle spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Blimo X-40 bruksanvisning



INNHold

I. INDLEDNING	1
II. SIKKERHET	2
III. REISESKUTEREN DIN	17
IV. BATTERIER OG LADING	23
V. BRUK.....	30
VI. KOMFORTJUSTERINGER	33
VII. DEMONTERING OG MONTERING	35
VIII. GRUNNLEGGENDE FEILSØKING	36
IX. PLEIE OG VEDLIKEHOLD	38
X. GARANTI	42
VEDLEGG I – SPESIFIKASJONER	28

SIKKERHETSRETNINGSLINJER

Kjære brukere, takk for at dere bruker vår mobilitetsscooter. Vi håper den kan gjøre arbeidet og livet deres enklere. For å bruke og betjene produktet riktig, holde det i god stand og forlenge levetiden, må dere lese instruksjonene nøye før dere bruker produktet.




ADVARSEL! En autorisert leverandør eller kvalifisert tekniker må utføre den første oppsettet av denne scooteren og må utføre alle prosedyrene i denne

manualen. Symbolene nedenfor brukes i hele denne brukerhåndboken og på scooteren for å identifisere advarsler og viktig informasjon. Det er svært viktig at du leser dem og forstår dem fullstendig.



ADVARSEL! Indikerer en potensielt farlig situasjon. Manglende overholdelse av angitte prosedyrer kan føre til personskade, skade på komponenter

eller funksjonsfeil. På produktet er dette ikonet representert som figuren til venstre.

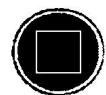

OBLIGATORISK! Disse handlingene må utføres som angitt. Manglende utførelse av obligatoriske handlinger kan føre til personskade og/eller skade på utstyret.

På produktet er dette ikonet representert som figuren til venstre.

Fyll ut følgende informasjon for rask referanse:

Leverandør:	
Adresse:	
Telefonnummer	
Kjøpsdato:	Serienummer:

MERK: Denne brukerhåndboken er utarbeidet på grunnlag av de nyeste spesifikasjonene og produktopplysningene som var tilgjengelige på tidspunktet for publisering. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når det er nødvendig. Eventuelle endringer i produktet du har kjøpt. Den nyeste/gjeldende versjonen av denne håndboken er tilgjengelig på vår nettside.

I. INNTRO

SIKKERHET

Produktet du har kjøpt kombinerer

toppmoderne komponenter med tanke på sikkerhet, komfort og stil. Vi er sikre på at designfunksjonene vil gi deg den bekvemmeligheten du forventer i dine daglige aktiviteter. Når du forstår hvordan du bruker og vedlikeholder dette produktet på en sikker måte, vil du kunne nyte mange års problemfri drift og service.

Les og følg alle instruksjoner, advarsler og merknader i denne håndboken og all annen medfølgende dokumentasjon før du bruker dette produktet for første gang. I tillegg er din sikkerhet avhengig av deg selv, samt din omsorgsperson, pleier og helsepersonell som bruker sunn fornuft.

Hvis det er informasjon i denne håndboken som du ikke forstår, eller hvis du trenger ytterligere hjelp til oppsett eller bruk, kan du kontakte din autoriserte leverandør.

Manglende overholdelse av instruksjonene, advarslene og merknadene i denne håndboken og de som finnes på produktet, kan føre til personskade eller skade på produktet og vil ugyldiggjøre produktgarantien.

KJØPERENS AVTALE

Ved å akseptere levering av dette produktet, lover du at du ikke vil endre, modifisere eller tilpasse dette produktet eller fjerne eller gjøre ubrukelige eller usikre noen av produktets beskyttelsesanordninger, skjold eller andre sikkerhetsfunksjoner; unnlate, nekte eller forsømme å installere eventuelle ettermonteringssett som vi fra tid til annen leverer for å forbedre og opprettholde sikker bruk av dette produktet.

FRAKT OG LEVERING

Før du bruker scooteren, må du kontrollere at leveransen er komplett, da noen komponenter kan være pakket separat. Hvis du ikke mottar en komplett leveranse, må du umiddelbart kontakte din autoriserte leverandør. Hvis det har oppstått skader under transporten, enten på emballasjen eller innholdet, må du kontakte det ansvarlige transportselskapet.

II. SIKKERHET

PRODUKTSIKKERHETSSYMBOLER

Symbolene nedenfor brukes på reisescooteren for å identifisere advarsler, obligatoriske handlinger og forbudte handlinger. Det er svært viktig at du leser og forstår dem fullstendig.



Les og følg informasjonen i brukerhåndboken.



Maksimal setevekt



Klem-/knusepunkter som oppstår under montering



Etsende kjemikalier i batteriet



EMI-RFI – Dette produktet er testet og godkjent med en immunitetsnivå på 20 V/M



Ulåst og i friløpsmodus. Plasser enheten på et jevnt underlag og på siden når du skifter fra kjøremodus til friløpsmodus eller fra friløpsmodus til kjøremodus.

Låst og i kjøremodus

II. SIKKERHET



Ikke la barn uten tilsyn leke i nærheten av Travel Scooter mens batteriene lades.



Ikke fjern anti-tippjulene.



Ikke bruk mobiltelefon, walkie/talkie, bærbar PC eller andre radiosendere under bruk.



Unngå eksponering for regn, snø, is, salt eller stående vann når det er mulig. Oppbevar og lagre i rene og tørre omgivelser.



Fjerning av jordingspinne kan skape elektrisk fare. Om nødvendig, installer en godkjent 3-pinnars adapter på en stikkontakt med 2-pinnars plugg.



Ikke koble en skjøteledning til AC/DC-omformereren eller batteriladeren.




Hold verktøy og andre metallgjenstander borte fra batteripolene. Kontakt med verktøy kan forårsake elektrisk støt.



Ikke åpne batteripakken før du har lest instruksjonene i brukerhåndboken om hvordan du gjør dette.



Hold hendene unna dekkene når du kjører. Vær oppmerksom på at løstsittende klær kan sette seg fast i drivhjulene.

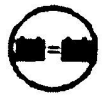

Ikke bruk batterier med forskjellig ampere-time (Ah) kapasitet. Ikke bland gamle og nye batterier. Bytt alltid begge batteriene samtidig.

II. SIKKERHET



Ikke sitt på mobilitetsproduktet når det brukes i forbindelse med noen form for løfte-/hevestyr.



Når du befinner deg på en helling eller nedoverbakke, må du aldri sette scooteren i friløpsmodus mens du sitter på den eller står ved siden av den.



Det foreligger eksplosive forhold!



Avfallshåndtering og gjenvinning – kontakt din autoriserte leverandør for informasjon om riktig avfallshåndtering av produktet og emballasjen.



Avfall og emballasjeprosess



Bruk vernebriller



Batterilader for innendørs bruk



Inneholder bly



Brannfarlig materiale. Ikke utsett for åpen ild.

GENERELT



OBLIGATORISK! Ikke bruk din nye Travel Scooter for første gang uten å ha lest og forstått denne brukerhåndboken fullstendig

Reisescooteren din er et toppmoderne livskvalitetsforbedrende hjelpemiddel designet for å øke mobiliteten. Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter som passer best til de individuelle behovene til brukeren av reisescooteren. Vær oppmerksom på at den endelige

II. SIKKERHET

valg og kjøpsbeslutning angående hvilken type Travel Scooter som skal brukes, er ansvaret til Travel Scooter-brukeren som er i stand til å ta en slik beslutning, og hans/hennes helsepersonell (dvs. lege, fysioterapeut osv.).

Innholdet i denne håndboken er basert på forventningen om at en mobilitetsutstyrseksperter har tilpasset reisescooteren riktig til brukeren og har bistått den behandlende helsepersonell og/eller den autoriserte leverandøren i instruksjonsprosessen for bruk av produktet.

Det finnes visse situasjoner, blant annet enkelte medisinske tilstander, hvor brukeren av reisescooteren må øve seg på å bruke reisescooteren i nærvær av en opplært assistent. En opplært assistent kan være et familiemedlem eller en profesjonell omsorgsperson som er spesielt opplært i å hjelpe en bruker av reisescooter i ulike daglige aktiviteter.

Når du begynner å bruke reisescooteren i daglige aktiviteter, vil du sannsynligvis møte situasjoner der du trenger litt øvelse. Ta deg god tid, så vil du snart ha full og trygg kontroll når du manøvrerer gjennom døråpninger, på og av heiser, opp og ned ramper og over moderat terreng.

Nedenfor finner du noen forholdsregler, tips og andre sikkerhetshensyn som vil hjelpe deg å bli vant til å bruke reisescooteren på en sikker måte.

MODIFIKASJONER

Vår scooter er designet og konstruert for å gi maksimal mobilitet og brukervennlighet. Du må imidlertid under ingen omstendigheter endre, legge til, fjerne eller deaktivere noen funksjoner, deler eller egenskaper på din Travel Scooter.



ADVARSEL! Ikke modifier Travel Scooter på noen måte som ikke er godkjent av oss. Ikke bruk tilbehør som ikke er

testet eller godkjent for våre produkter AVTAKBARE DELER



ADVARSEL! Ikke forsøk å løfte eller flytte Travel Scooter ved hjelp av noen av de avtakbare delene, inkludert armlener, sete eller skjerm.

SIKKERHETSKONTROLL FØR KJØRING

Bli kjent med følelsen av reisescooteren og dens funksjoner. Vi anbefaler

II. SIKKERHET

at du utfører en sikkerhetskontroll før hver bruk for å sikre at Travel Scooter fungerer jevnt og sikkert.

Utfør følgende kontroller før du bruker scooteren:

- Kontroller alle elektriske tilkoblinger. Forsikre deg om at de sitter godt fast og ikke er korroderte.
- Kontroller alle ledningsforbindelser. Forsikre deg om at de er ordentlig festet.
- Kontroller bremsene.
- Kontroller batteriets ladning.

Hvis du oppdager et problem, kontakt din autoriserte leverandør for hjelp.

VEKTBEGRENSNINGER

Scooteren din har en maksimal vektkapasitet. Se spesifikasjonstabellen for informasjon.



OBLIGATORISK! Hold deg innenfor den angitte vektkapasiteten for scooteren din. Overskridelse av vektkapasiteten, blir garantien ugyldig.

vil ikke holdes ansvarlig for personskader og/eller materielle skader som skyldes manglende overholdelse av vektbegrensninger.



ADVARSEL! Ikke ta med passasjerer på scooteren din.

Å frakte passasjerer på scooteren din kan påvirke tyngdepunktet, noe som kan føre til at du velter eller faller.

INFORMASJON OM HELNING

Flere og flere bygninger har ramper med spesifisert hellingsgrad, designet for enkel og sikker tilgang. Noen ramper kan ha svinger (180-graders svinger) som krever at du har gode svingferdigheter på scooteren.

- Vær ekstremt forsiktig når du nærmer deg en nedoverbakke eller annen helling
- Ta brede svinger med scooteren din rundt trange hjørner. Hvis du gjør det, vil scooterens bakhjul følge en bred bue, ikke kutte hjørnet kort, og ikke støte borti eller henge seg fast i rekkverk hjørner.
- Når du kjører ned en rampe, må du holde scooterens hastighetsjustering på den laveste hastigheten for å sikre en trygg og kontrollert nedkjøring.
- Unngå plutselige stopp og starter. Når du kjører oppoverbakke, prøv å holde Travel Scooteren i bevegelse. Hvis du må stoppe, start igjen sakte og akselerer deretter.

II. SIKKERHET

Vær forsiktig. Når du kjører nedover en skråning, må du sette hastighetsregulatoren på laveste hastighet og kun kjøre fremover. Hvis scooteren begynner å bevege seg nedover bakken raskere enn du hadde forventet eller ønsket, la den komme til fullstendig stopp ved å slippe gasskontrollspaken. Skyv deretter gasskontrollspaken litt fremover for å sikre en trygg og kontrollert nedkjøring.



ADVARSEL! Når du er på en stigning eller nedoverbakke, må du aldri sette reisescooteren i frihjulsmodus mens du sitter på

den eller står ved siden av den.

ADVARSEL! Når du kjører oppover en skråning, må du ikke kjøre i sikksakk eller i vinkel oppover skråningen. Kjør reisescooteren rett oppover skråningen. Dette reduserer risikoen for å velte eller falle betydelig. Vær alltid ekstremt forsiktig når du kjører i skråninger.



ADVARSEL! Kjør ikke Travel Scooteren på siden av en skråning eller diagonalt opp eller ned en skråning; stopp ikke, hvis mulig,

mens du kjører opp eller ned en skråning.

ADVARSEL! Du bør ikke kjøre opp eller ned en potensielt farlig skråning (f.eks. områder dekket av snø, is, klippet gress eller løv).


ADVARSEL! Selv om Travel Scooter kan klatre i stigninger som er større enn de som er illustrert i figur 1, må du under ingen omstendigheter overskride retningslinjene for stigninger eller andre spesifikasjoner som er angitt i denne håndboken. Dette kan føre til ustabilitet i Travel Scooter.

Handikapramper for offentlig tilgang er ikke underlagt offentlige reguleringer i alle land, og har derfor ikke nødvendigvis samme standard hellingsgrad. Andre hellinger kan være naturlige eller, hvis de er menneskeskapte, ikke spesielt designet for reisescootere. Figur 1 illustrerer reisescooterens stabilitet og evne til å klatre i bakker under ulike vektbelastninger og under kontrollerte testforhold. Disse testene ble utført med reisescooterens sete i høyeste posisjon.

og justert bakover på setebunnen til den bakerste posisjonen. Bruk dette informasjon som retningslinje. Din Travel Scooters evne til å kjøre oppoverbakker er

II. SIKKERHET

påvirket av vekten din, hastigheten på reisescooteren din, hastigheten på reisescooteren din, vinkelen du nærmer deg bakken med, og innstillingene på reisescooteren din.

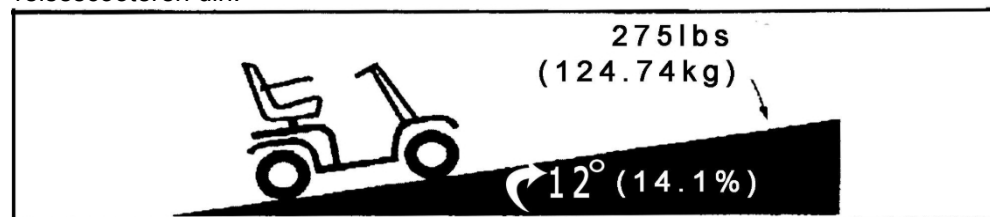

Figur 1. Maksimal anbefalt stigningsvinkel




ADVARSEL! Ethvert forsøk på å kjøre opp eller ned en skråning som er brattere enn det som er vist i figur 1, kan gjøre reisescooteren ustabil posisjon og føre til at den velter. **ADVARSEL!** Bær aldri en oksygentank som veier mer enn 15 lbs (6,8 kg). Fyll aldri kurven foran eller bak med innhold som veier mer enn 15 lbs (6,8 kg).


Når du nærmer deg en stigning, er det best å lene seg fremover. Se figur 2 og 2A. Dette forskyver tyngdepunktet til deg og reisescooteren mot fronten av reisescooteren for bedre stabilitet.

MERK: Når du kjører på ramper, kan den motoriserte reisescooteren «rulle tilbake» ca. 1 fot (30,5 cm) før bremsen aktiveres hvis gasspaken slippes mens du kjører fremover. Hvis gasspaken slippes

- Når du kjører bakover, kan den motoriserte reisescooteren «rulle tilbake» omtrent 1 meter før bremsen aktiveres.

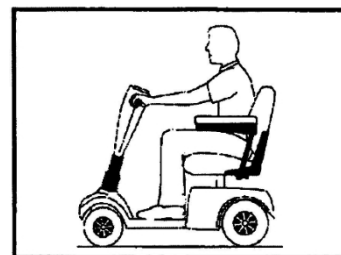

Figur 2. Normal kjørestilling

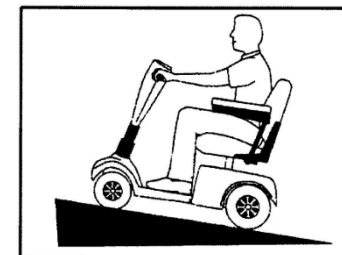

Figur 2A. Økt stabilitet under kjøring posisjon

II. SIKKERHET

INFORMASJON OM SVINGKJØRING

For høye kurvehastigheter kan føre til at du velter. Faktorer som påvirker risikoen for å velte inkluderer, men er ikke begrenset til, kurvehastighet, styrevinkel (hvor skarpt du svinger), ujevne veibaner, skrånende veibaner, kjøring fra et område med lav friksjon til et område med høy friksjon (for eksempel når du kjører fra et gressområde til et asfaltert område, spesielt ved høy hastighet mens du svinger) og retningsendringer. Høye kurvehastigheter anbefales ikke. Hvis du føler at du kan velte i en kurve, reduser hastigheten og styrevinkelen (dvs. reduser svingens skarphet) for å forhindre at Travel Scooter velter.



ADVARSEL! Når du svinger skarpt, reduser hastigheten og hold tyngdepunktet stabilt. Når du bruker reisescooteren i høyere hastigheter, må du ikke svinge skarpt. Dette reduserer

sannsynligheten for at du velter eller faller. Bruk alltid sunn fornuft når du svinger.

INFORMASJON OM BREMSING

Reisescooteren din er utstyrt med disse kraftige bremsesystemene:

- Regenerativ: Bruker elektrisitet til å bremse kjøretøyet raskt når gasspaken returneres til midt-/stopp-posisjon.
 - Skivebrems: Aktiveres mekanisk etter at regenerativ bremsing har bremsset kjøretøyet til nesten stillstand, eller når strømmen av en eller annen grunn blir koblet fra systemet.
- UTENDØRS KJØREFLATER**
- Reisescooteren din er designet for å gi optimal stabilitet under normale kjøreforhold – tørre, jevne overflater av betong, asfalt eller asfaltbelegg. Vi er imidlertid klar over at det vil være tilfeller hvor du vil møte andre typer underlag. Av denne grunn er reisescooteren din designet for å fungere utmerket på hardpakket jord, gress og grus. Du kan trygt bruke reisescooteren din på plener og i parkområder.
- Reduser hastigheten på reisescooteren din når du kjører på ujevnt terreng og/eller myke overflater.

- Unngå høyt gress som kan sette seg fast i drivverket.
- Unngå løst grus og sønd.
- Hvis du er usikker på kjøreunderlaget, bør du unngå det.

II. SIKKERHET

OFFENTLIGE GATER OG VEIER



ADVARSEL! Du bør ikke bruke Travel Scooter på offentlige gater og veier.

for å se deg når du sitter på din reisescooter. Følg alle lokale trafikkregler for fotgjengere. Vent til veien er fri for trafikk, og fortsett deretter med ekstrem forsiktighet.

STASJONÆRE HINDRE (TRINN, FORTAUSKANter MV.)




ADVARSEL! Ikke kjør i nærheten av forhøyede overflater, ubeskyttede avsatser og/eller stup (fortauskanter, verandaer, trapper osv.).

ADVARSEL! Ikke forsøk å få Travel Scooter til å klatre opp eller ned forhindringer som er uforholdsmessig høye.

ADVARSEL! Ikke forsøk å kjøre Travel Scooter bakover ned trapper, fortauskanter eller andre hindringer. Dette kan føre til at Travel Scooter velter.

ADVARSEL! Sørg for at reisescooteren kjører vinkelrett på fortauskanter du må kjøre opp eller ned, se figur 3 og 4.

ADVARSEL! Ikke forsøk å kjøre over en fortauskant som er høyere enn 2 tommer (5 cm)

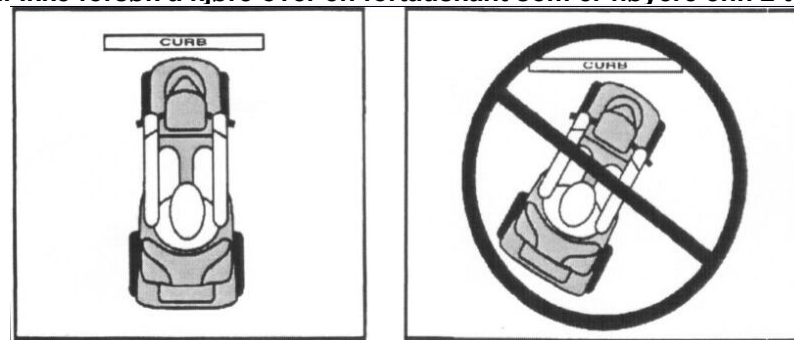

Figur 3. Riktig tilnærming til fortauskanter Figur 4. Feil tilnærming til fortauskanter

FORHOLDSREGLER VED DÅRLIG VÆR

Utsettelse av reisescooteren for dårlige værforhold bør unngås.

II. SIKKERHET

unngås så langt det er mulig. Hvis du plutselig blir overrasket av regn, snø, sterk kulde eller varme mens du bruker Travel Scooter, må du søke ly så snart som mulig. Tørk Travel Scooter grundig før du oppbevarer, lader eller bruker den.



FORBUDT! Bruk i regn, snø, salt, tåke/sprut og på isete, glatte overflater kan ha en negativ innvirkning på

Det elektriske systemet. Vedlikehold og oppbevar reisescooteren i tørre og rene omgivelser.



ADVARSEL! Langvarig eksponering for varme eller kulde kan påvirke temperaturen på polstrede og ikke-polstrede deler

på reisescooteren, noe som kan føre til hudirritasjon. Vær forsiktig når du bruker reisescooteren i ekstremt varme eller kalde forhold, eller når du utsetter reisescooteren for direkte sollys i lengre perioder.

FRILØPSMODUS

Reisescooteren din er utstyrt med en manuell frihjulspak som, når den skyves fremover, gjør at reisescooteren kan skyves. For mer informasjon om hvordan du setter reisescooteren i og ut av frihjulsmodus, se III «Reisescooteren din».



ADVARSEL! Når reisescooteren er i frihjulsmodus, er bremsesystemet deaktivert.

- Koble fra drivmotorene kun på et jevnt underlag.
- Sørg for at nøkkelen er fjernet fra nøkkelbryteren.
- Stå ved siden av Travel Scooter for å koble inn eller ut frihjulsmodus. Sett deg aldri på en Travel Scooter for å gjøre dette.
- Når du er ferdig med å skyve reisescooteren, må du alltid sette den tilbake i kjøremodus for å låse bremsene.

En ekstra funksjon som er innebygd i reisescooteren er «push-too-fast»-beskyttelse som beskytter Travel Scooter mot å få for høy hastighet i frihjulsmodus.

II. SIKKERHET

«push-too-fast» fungerer forskjellig avhengig av hvilken av to tilstander som foreligger:

- Hvis nøkkelen er slått av i friløpsmodus, aktiverer Travel Scooters kontroller regenerativ bremsing når Travel Scooter skyves raskere enn en forhåndsprogrammert maksimumgrense. I dette tilfellet fungerer kontrolleren som en hastighetsregulator.
- Hvis nøkkelen er slått på mens du er i friløpsmodus, vil du møte betydelig motstand uansett hastighet. Dette forhindrer at Travel Scooter får uønsket fart hvis den manuelle friløpspaken utilsiktet slippes mens du kjører Travel Scooter.

TRAPPER OG RULLETRAPPER

Travel Scooter er ikke konstruert for å kjøre opp eller ned trapper eller rulletrapper. Bruk alltid heis.



ADVARSEL! Ikke bruk Travel Scooter til å kjøre opp eller ned trapper eller rulletrapper.

DØRER

- Finn ut om døren åpnes mot eller vekk fra deg.
- Bruk hånden til å vri på knotten eller skyve håndtaket eller skyvebaren.
- Kjør reisescooteren forsiktig og sakte fremover for å skyve døren opp. Eller kjør reisescooteren forsiktig og sakte bakover for å trekke døren opp.

HEISER

Moderne heiser har en sikkerhetsmekanisme på dørkanten som, når den trykkes på, åpner døren(e) igjen.

- Hvis du befinner deg i døråpningen til en heis når døren/dørene begynner å lukkes, trykk på gummidørkanten eller la gummikanten på døren komme i kontakt med reisescooteren, så åpnes døren igjen.
- Vær forsiktig så vesker, pakker eller Travel Scooter-tilbehør ikke setter seg fast i heisdørene.

MERK: Hvis svingradiusen til reisescooteren din er større enn 1500 mm, kan det være vanskelig å manøvrere den i heiser og innganger til bygninger. Vær forsiktig.

II. SIKKERHET

når du prøver å svinge eller manøvrere reisescooteren din i små rom, og unngå områder som kan utgjøre et problem.

LØFTE-/HEVEUTSTYR

Hvis du skal reise med reisescooteren din, kan det være nødvendig å bruke et løfte-/heveprodukt for å lette transporten. We Scooter anbefaler at du leser nøye gjennom instruksjonene, spesifikasjonene og sikkerhetsinformasjonen fra produsenten av løfte-/heveproduktet før du bruker det.



ADVARSEL! Sett deg aldri på reisescooteren når den brukes i forbindelse med noen form for løfte-/heveprodukt

produkt. Reisescooteren din er ikke designet for slik bruk, og vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår ved slik bruk.

BATTERIER

I tillegg til å følge advarselen nedenfor, må du sørge for å overholde alle andre opplysninger om håndtering av batterier.



OBLIGATORISK! Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør inneholder bly og blyforbindelser. Bruk vernebriller og

Vask hendene etter håndtering.



ADVARSEL! Scooterbatterier er tunge. Se spesifikasjonstabellen. Hvis du ikke klarer å løfte så mye vekt, må du be om hjelp, bruke

riktige løfteteknikker og unngå å løfte mer enn du er i stand til. **ADVARSEL! Beskytt alltid batteriene mot frost og lad aldri et frossent batteri.**

ADVARSEL! Koble batterikablene på riktig måte. RØDE (+) kabler må kobles til positive (+) batteriterminaler/poler. SVARTE (-) kabler må kobles til negative (-) batteriterminaler/poler. BYTT ut kabler umiddelbart hvis de er skadet.

Beskyttelseshetter må monteres over alle batteripolene.

MERK: Hvis du oppdager et skadet eller sprukket batteri, må du umiddelbart legge det i en

II. SIKKERHET

plastpose og kontakt ditt lokale avfallsselskap eller autorisert leverandør for instruksjoner om avhending og gjenvinning av batterier. Dette er vår anbefalte fremgangsmåte.

TRANSPORT MED MOTORKJØRETØY

Vi anbefaler at du ikke sitter i reisescooteren mens du reiser i et motorkjøretøy.

Reisescooteren bør oppbevares i bagasjerommet på en bil eller bak i en lastebil eller varebil med batteriene fjernet og ordentlig festet. I tillegg bør alle avtakbare deler av reisescooteren, inkludert armlener, sete og deksel, fjernes og/eller festes ordentlig under transport med motorkjøretøy.



ADVARSEL! Selv om reisescooteren din kan være utstyrt med et posisjoneringsbelte, er dette beltet ikke designet for å gi sikkerhetsbelte

under transport i motorvogn. Alle som reiser i motorvogn, skal være ordentlig festet i motorvognsetet med sikkerhetsbelter som er festet på riktig måte.

ADVARSEL! Ikke sitt på reisescooteren mens den befinner seg i et kjøretøy i bevegelse. ADVARSEL! Sørg alltid for at reisescooteren og batteriene er ordentlig festet når den transporteres. Batteriene skal festes i oppreist stilling, og beskyttelseshetter skal monteres på batteripolene. Batteriene skal ikke transporteres sammen med brennbare eller brannfarlige gjenstander.

POSISJONERINGSBELTER

Selv om reisescooteren din kan være utstyrt med et posisjoneringsbelte, er dette beltet ikke designet for å gi tilstrekkelig sikkerhet under transport i motorvogn. Alle som reiser i en motorvogn, skal være ordentlig festet i motorvognens sete med sikkerhetsbelter som er festet på en sikker måte.



ADVARSEL! Ikke sitt på reisescooteren mens den befinner seg i et kjøretøy i bevegelse.

ADVARSEL! Sørg for at reisescooteren og batteriene er ordentlig festet når den transporteres.

FOREBYGG UØNSKET BEVEGELSE.

II. SIKKERHET



ADVARSEL! Hvis du forventer å sitte i en stillestående posisjon i lengre tid, må du slå av strømmen. Dette vil forhindre

uventede bevegelser fra utilsiktet kontakt med gasspaken.

Å SETTE SEG PÅ OG STIGE AV REISESKUTEREN

Det krever god balanse å stige på og av reisescooteren. Følg disse sikkerhetstipsene når du stiger på og av reisescooteren:

- Ta nøkkelen ut av nøkkelbryteren.
- Forsikre deg om at reisescooteren ikke er i friløpsmodus. Se III. «Reisescooteren din».
- Sørg for at setet er festet på plass.
- Sving armlenene opp for å gjøre det lettere å sette seg på og av reisescooteren.



ADVARSEL! Sett deg så langt bak i Travel Scooter-setet som mulig for å forhindre at Travel Scooter velter og

forårsaker skader.

ADVARSEL! Unngå å legge hele vekten din på armlenene på reisescooteren, og ikke bruk armlenene til å bære vekt, for eksempel ved forflytning. Slik bruk kan føre til at reisescooteren velter, noe som kan resultere i fall fra reisescooteren og/eller personskade.

ADVARSEL! Unngå å legge hele vekten din på gulvplaten. Slik bruk kan føre til at Travel Scooter velter.

STREKKE SEG OG BØYE SEG

Unngå å strekke deg eller bøye deg mens du kjører Travel Scooter. Å bøye deg fremover medfører risiko for utilsiktet kontakt med gasspaken. Å bøye deg til siden mens du sitter medfører risiko for velte. Det er viktig å opprettholde et stabilt tyngdepunkt og hindre at Travel Scooter velter. Vi anbefaler at brukeren av Travel Scooter vurderer sine personlige begrensninger og øver på å bøye seg og strekke seg i nærvær av en kvalifisert assistent.

II. SIKKERHET



ADVARSEL! Ikke bøy deg, len deg eller strekk deg etter gjenstander hvis du må plukke dem opp fra dekket på reisescooteren eller fra en av sidene av

Travel Scooteren. Slike bevegelser kan endre tyngdepunktet og vektfordelingen på Travel Scooteren og føre til at Travel Scooteren velter.



FORBUDT! Hold hendene unna dekkene når du kjører. Vær oppmerksom på at løstsittende klær kan sette seg fast

sette seg fast i drivhjulene.

RESEPTPLIKTIGE MEDISINER/FYSISKE BEGRENSNINGER

Brukeren av Travel Scooter må utvise forsiktighet og sunn fornuft når han/hun bruker Travel Scooter. Dette inkluderer bevissthet om sikkerhetsproblemer når man tar reseptbelagte eller reseptfrie medisiner, eller når brukeren har spesifikke fysiske begrensninger.

ELEKTROMAGNETISK OG RADIOFREKVENSIINTERFERENS (EMI/RFI)



ADVARSEL! Laboratorietester har vist at elektromagnetiske bølger og radiofrekvensbølger kan ha en negativ innvirkning på ytelsen til elektrisk drevne transportmidler.

ytelsen til elektrisk drevne mobilitetskjøretøy.

Elektromagnetisk og radiofrekvensinterferens kan komme fra kilder som mobiltelefoner, telefoner, mobile toveis (for eksempel walkie-talkies, walkie-talkies), radiostasjoner, TV-stasjoner, TV-stasjoner, amatørradio (HAM) sendere, trådløse datamaskinkoblinger, mikrobølgesignaler, personsøkersendere og mellomdistanse mobile transceivere som brukes av utrykningskjøretøyer. I noen tilfeller kan disse bølgene forårsake utilsiktet bevegelser eller skade på kontrollen, kontrollsystemet. Alle elektrisk drevne mobilitetskjøretøyer har en immunitet (eller motstand) mot EMI. Jo høyere immunitetsnivå, desto større beskyttelse mot EMI. Dette produktet er testet og har bestått med et immunitetsnivå på 20 V/M.

II. SIKKERHET



ADVARSEL! Vær oppmerksom på at mobiltelefoner, toveis radioer, bærbare datamaskiner og andre typer radiosendere kan forårsake utilsiktet bevegelse

på ditt elektrisk drevne mobilitets kjøretøy på grunn av EMI. Vær forsiktig når du bruker noen av disse enhetene mens du kjører mobilitets kjøretøyet ditt, og unngå å komme i nærheten av radio- og TV-stasjoner.




ADVARSEL! Tillegg av tilbehør eller komponenter til det elektrisk -drevet mobilitetshjelpemiddel kan øke kjøretøyets følsomhet

kjøretøyet for EMI. Ikke modifier Travel Scooter på noen måte som ikke er godkjent av oss. **ADVARSEL!** Det elektrisk drevne mobilitets kjøretøyet kan forstyrre ytelsen til andre elektriske enheter i nærheten, for eksempel alarmsystemer.

III. TRAVEL SCOOTER

TILLERKONSOLL

Tillerkonsollen inneholder alle kontroller som trengs for å kjøre reisescooteren din, inkludert nøkkelbryter, blinklys, hornknapp, hastighetsreguleringshjul, kjørekontrollspak og batteristatusmåler. Se figur 5.

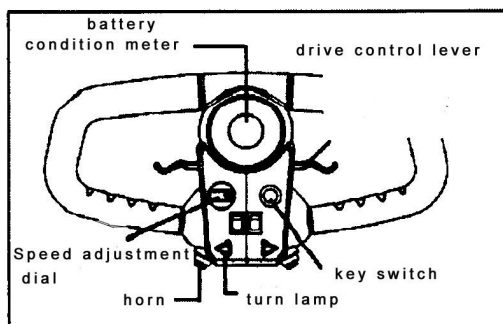

Figur 5. Rattkonsoll



FORBUDT! Utsett ikke rattkonsollen for fuktighet. I til rattkonsollen blir utsatt for fuktighet, må du

III. DIN REISESKUTER

Ikke prøv å bruke reisescooteren før styrekonsollen er helt tørr.

Nøkkelbryter

- Sett nøkkelen inn i nøkkelbryteren og vri den med klokken for å slå på (aktivere) Travel Scooter.
- Vri nøkkelen mot klokken for å slå av (slå av) reisescooteren. Selv om nøkkelen kan bli stående i nøkkelbryteren når reisescooteren er slått av, anbefaler vi at du tar den ut for å forhindre uautorisert bruk av reisescooteren.



ADVARSEL! Hvis nøkkelen flyttes fra «OFF»-posisjonen mens reisescooteren er i bevegelse, vil de elektroniske bremsene aktiveres og

Travel Scooteren din vil stoppe brått! Gasskontrollspaken

Denne spaken lar deg kontrollere fremoverhastigheten og bakoverhastigheten på Travel Scooter opp til den maksimale hastigheten du har forhåndsinnstilt med hastighetsjusteringshjulet.

- Plasser høyre hånd på høyre håndtak og venstre hånd på venstre håndtak.
- Bruk høyre tommel til å trykke på høyre side av spaken for å løsne bremsene på Travel Scooter og kjør fremover.
- Slipp spaken og la Travel Scooter stoppe helt før du trykker på den andre siden av spaken for å kjøre bakover.
- Når gassen er helt sluppet, går den automatisk tilbake til midtposisjonen «stopp» og aktiverer bremsene på Travel Scooter.

Hornknapp

Denne knappen aktiverer et advarselssignal. Travel Scooter må være slått på for at signalet skal fungere. Ikke nøl med å bruke advarselssignalet når det kan forhindre ulykker og skader.

Hastighetsjusteringshjul

III. REISESKUTEREN DIN

Denne knappen lar deg forhåndsvelge og begrense toppfarten til reisescooteren din.

- Bildet av skilpadden representerer den laveste hastighetsinnstillingen.
- Bildet av haren representerer den høyeste hastighetsinnstillingen.

Batteristatusmåler

Når nøkkelen er helt satt inn i nøkkelbryteren, viser denne måleren omtrentlig batteristyrke. For mer informasjon om batteristatusmåleren, se IV. «Batterier og lading»

BAKRE DEL

Den manuelle friløpshendelen, anti-tipphjulene og motor-/transakslenheten er plassert på bakdelen av Travel Scooteren. Se figur 6.




ADVARSEL! Før du setter Travel Scooter i eller tar den ut av friløpsmodus, må du fjerne nøkkelen fra nøkkelbryteren. Sitt aldri

på reisescooteren når den er i frihjulsmodus. Sett aldri reisescooteren i frihjulsmodus på en skråning.

Manuell frihjulspak

Når du trenger eller ønsker å skyve reisescooteren over korte avstander, kan du sette den i frihjulsmodus.

1. Finn den manuelle frihjulspaken øverst til høyre på bakdelen.
2. Skyv den manuelle frihjulspaken fremover for å deaktivere drivsystemet og bremsesystemet.
3. Nå kan du skyve reisescooteren.
4. Skyv den manuelle friløpsspaken bakover for å koble inn drivverket og bremsesystemene igjen. Dette tar Travel Scooter ut av friløpsmodus.

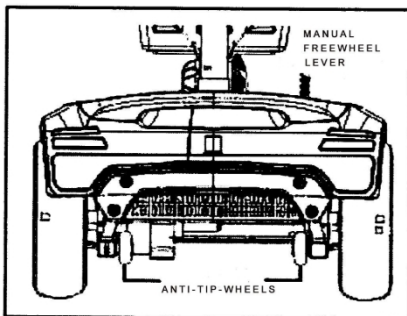

Figur 6. Bakre del

III. REISESKUTEREN DIN



ADVARSEL! Når reisescooteren er i frihjulsmodus, er bremsesystemet deaktivert.

- Koble fra drivmotorene kun på et jevnt underlag.
- Sørg for at nøkkelen er fjernet fra nøkkelbryteren
- Stå ved siden av reisescooteren for å koble inn eller ut frihjulsmodus. Sitt aldri på en reisescooter for å gjøre dette.
- Når du er ferdig med å skyve reisescooteren, må du alltid sette den tilbake i kjøremodus for å låse bremsene.

Anti-tip Hjul.

Anti-tip-hjulene er en integrert og viktig sikkerhetsfunksjon på Travel Scooter. De er boltet fast til rammen bak på Travel Scooter.



FORBUDT! Ikke fjern anti-tip-hjulene eller modifiser Travel Scooteren på noen måte som ikke er godkjent av oss.

Motor/transakselsamling

Motor-/transakselsammenstillingen er en elektromekanisk enhet som omdanner elektrisk energi fra Travel Scooter-batteriene til kontrollert mekanisk energi som driver Travel Scooter-hjulene.

BATTERIPAKKE

Reisescooteren din er utstyrt med et innovativt batteripakke som er lett å fjerne. Et håndtak på toppen av batteripakken gjør det enkelt å løfte pakken av reisescooteren med én hånd. Batteripakken inneholder to batterier (standard 20 Ah), ladekontakten, hovedbryteren (reset-knapp) og batteripakkens sikring. Se figur 7.


Ladekontakt

Den 3-pinnens enden av ladekabelen plugges inn i denne kontakten.

Hovedbryter (tilbakestillingsknapp)

Når spenningen i batteriene til Travel Scooter blir lav eller Travel Scooter blir sterkt belastet på grunn av for stor belastning eller bratte stigninger, kan hovedbryteren utløses for å beskytte motoren og elektronikken mot skader.

III. REISESKUTEREN DIN

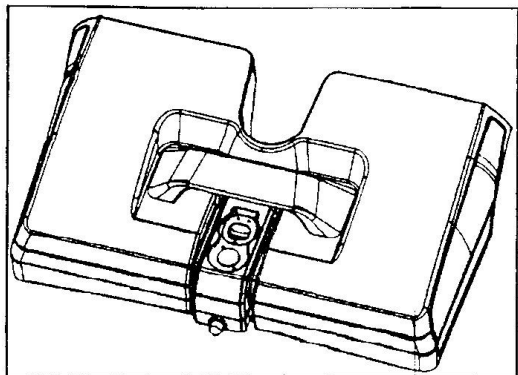


Figur 7. Batteripakke (20AHh-pakke vist)

- Hovedbryterens tilbakestillingsknapp spretter ut når bryteren utløses.
- Når bryteren utløses, slås hele det elektriske systemet på Travel Scooter av.
- Vent et minutt eller to slik at elektronikken i Travel Scooter kan «hvile».
- Trykk på tilbakestillingsknappen for å tilbakestille hovedbryteren.
- Hvis hovedbryteren utløses ofte, kan det hende du må lade batteriene oftere. Det kan også hende du må be din autoriserte leverandør om å utføre en belastningstest på batteriene til Travel Scooter.
- Hvis hovedbryteren utløses gjentatte ganger, kontakt din autoriserte leverandør for service.

SIKRING I RORKONSOLLEN

Sikringen under batteripakken beskytter elektronikken i rorkonsollen. Se figur 8.

Hvis noen av komponentene i rorkonsollen ikke reagerer, må du sjekke denne sikringen. Se VIII. «Grunnleggende feilsøking» for instruksjoner om utskifting av sikringer.

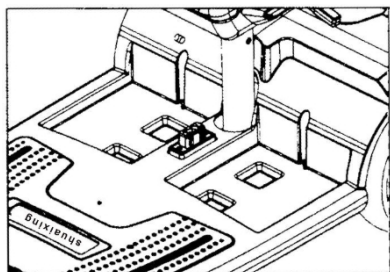


Figur 8. 3-ampers sikring i rorkonsollen

III. DIN REISESKUTER

EKSTERN BATTERILADER

Den eksterne batteriladeren lader Travel Scooters batterier når den er koblet til ladekontakten (plassert på batteripakken) og en standard stikkontakt. Se figur 9.

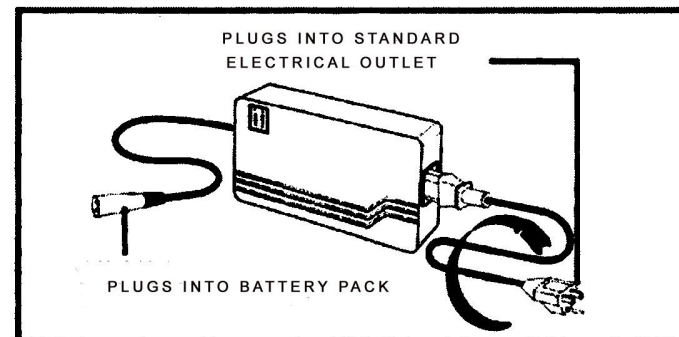


Figur 9. Ekstern batterilader

III. REISESKUTEREN DIN



AVLESNING AV BATTERISPENNING

Batteristatusmåleren på styrekonsollen viser batterienes omtrentlige styrke. Gul farge indikerer at batteriet er i ferd med å tømmes, og rød farge indikerer at batteriet må lades umiddelbart. Se figur 12. For å sikre høyest mulig nøyaktighet bør batteristatusmåleren kontrolleres mens du kjører Travel Scooter med full hastighet på et tørt, jevnt underlag.

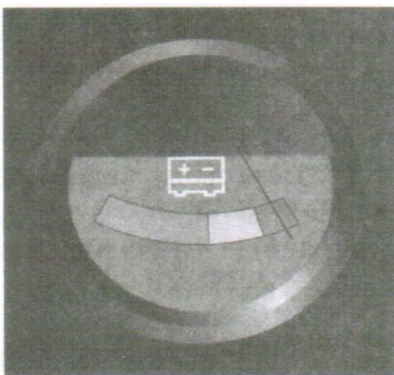

Figur 12. Batteristatusmåler

LADING AV BATTERIER

MERK: Batteripakken kan lades på eller utenfor Travel Scooter.

IV. BATTERIER OG LADING AV



FORBUDT! Fjerning av jordingspinne kan skape elektrisk fare. Om nødvendig, installer en godkjent 3-pinner adapter

adapter til en stikkontakt med 2-pinner tilgang.



FORBUDT! Bruk aldri en skjøteledning for å koble batteriladeren direkte til en standard stikkontakt med riktig kabling.



FORBUDT! Ikke la barn uten tilsyn leke i nærheten av Travel Scooter mens batteriene lades. Vi anbefaler

at du ikke lader batteriene mens Travel Scooter er i bruk.



OBLIGATORISK! Les instruksjonene for batterilading i denne håndboken og i håndboken som følger med batteriladeren

før du lader batteriene.



ADVARSEL! Det kan dannes eksplosive gasser under lading av batteriene. Hold reisescooteren og batteriladeren borte fra

antennelseskilder som flammer eller gnister, og sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du lader batteriene.

ADVARSEL! Du må lade reisescooteren med den medfølgende eksterne laderen. Ikke bruk en bilbatterilader.



ADVARSEL! Kontroller batteriladeren, ledningene og kontaktene for skader før hver bruk. Kontakt din autoriserte

leverandør hvis du finner skader.

ADVARSEL! Ikke forsøk å åpne batteriladerens deksel. Hvis batteriladeren ikke ser ut til å fungere som den skal, må du kontakte din autoriserte leverandør.



ADVARSEL! Hvis batteri lader er utstyrt med kjøling spor, så ikke prøv å stikke gjenstander inn i disse sporene.

IV. BATTERIER OG LADING



ADVARSEL! Hvis batteriladeren ikke er testet og godkjent for utendørs bruk, må den ikke utsettes for ugunstige


ekstreme værforhold . Hvis batteriladeren utsettes for ugunstige eller ekstreme værforhold , må den få tid til å tilpasse seg forskjellen i miljøforhold før den brukes innendørs. Se bruksanvisningen som følger med batteriladeren for mer informasjon.

Følg disse enkle trinnene for å lade batteriene dine på en sikker måte:

1. Plasser reisescooteren eller batteripakken nær en standard stikkontakt. Se figur 13.
2. Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren.
3. Kontroller at den manuelle friløpshendelen er i kjøremodus (bakover).
4. Koble laderen til strømuttaket på reisescooteren, og deretter til stikkontakten. Vi anbefaler at du lader batteriene i 8 til 14 timer.

MERK: LED-lampene på laderen indikerer forskjellige ladetilstander på forskjellige tidspunkter. Se bruksanvisningen som følger med laderen for en fullstendig forklaring av disse indikatorene.

5. Når batteriene er fulladet, kobler du laderen fra strømuttaket og deretter fra laderen.

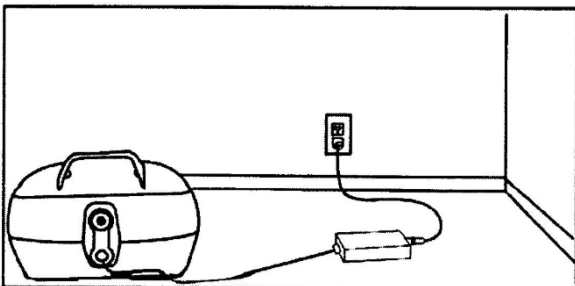

Figur 13. Lading av batteriene
(Batteripakke fjernet)

MERK: Travel Scooter har en funksjon som hindrer lading. Travel Scooter vil ikke kjøre, og batteriets tilstand

IV. BATTERIER OG LADING

fungerer ikke mens batteriene lades (når batteripakken lades på reisescooteren).

OFTEST STILTE SPØRSMÅL

Hvordan fungerer laderen?

Når batterispenningen på Travel Scooter er lav, jobber laderen hardere og sender mer strøm til batteriene for å øke ladningen. Når batteriene nærmer seg full lading, sender laderen mindre og mindre strøm. Når batteriene er fulladet, er strømmen som sendes fra laderen nesten null ampere. Derfor, når laderen er koblet til, opprettholder den ladningen på batteriene til Travel Scooter, men overlader dem ikke. Vi anbefaler ikke at du lader batteriene til Travel Scooter i mer enn 24 timer i strekk.

Hva hvis batteriene til Travel Scooter min ikke lades?

- Forsikre deg om at sikringen på batteripakken er i god stand.
- Sørg for at begge ender av laderens strømkabel er satt helt inn.

Kan jeg bruke en annen lader?

Ladere velges nøye ut for bestemte bruksområder og er spesielt tilpasset typen, størrelsen og den kjemiske sammensetningen til bestemte batterier. For å sikre den sikreste og mest effektive ladingen av batteriene til din Travel Scooter, anbefaler vi at du bruker laderen som følger med som originalutstyr til scooteren. Produktet. Enhver lademetode som resulterer i at batteriene lades individuelt, er spesielt forbudt.

Hvor ofte må jeg lade batteriene?

To viktige faktorer må tas i betraktning når du bestemmer hvor ofte du skal lade batteriene til reisescooteren din:

- Daglig bruk hele dagen.
- Sjelden eller sporadisk bruk.

Med disse hensynene i bakhodet kan du bestemme hvor ofte og hvor lenge du bør lade batteriene til Travel Scooter. Batteriladeren ble utformet slik at den ikke overlader batteriene til Travel Scooter. Det kan imidlertid oppstå problemer hvis du ikke lader batteriene

N. BATTERIER OG LADING

ofte nok og hvis du ikke lader dem regelmessig. Ved å følge retningslinjene nedenfor vil du sikre sikker og pålitelig batteridrift og lading.

- Hvis du bruker Travel Scooter daglig, må du lade batteriene så snart du er ferdig med å bruke den for dagen. Da vil Travel Scooter være klar hver morgen. Vi anbefaler at du lader batteriene til Travel Scooter i 8 til 14 timer etter daglig bruk.
- Hvis du bruker Travel Scooter en gang i uken eller sjeldnere, må du lade batteriene minst en gang i uken i 12 til 14 timer av gangen.
- Hold batteriene til reisescooteren fulladet.
- Unngå å lade Travel Scooter-batteriene helt ut.

Hvordan kan jeg sikre maksimal batterilevetid?

Fulladet dypcykelbatterier gir pålitelig ytelse og lengre batterilevetid. Hold batteriene til reisescooteren fulladet når det er mulig. Beskytt reisescooteren og batteriene mot ekstrem varme eller kulde. Batterier som regelmessig og dypt utlades, sjelden lades, oppbevares i ekstreme temperaturer eller oppbevares uten å være fulladet, kan bli permanent skadet, noe som fører til upålitelig ytelse og begrenset levetid.

Hvordan kan jeg oppnå maksimal rekkevidde eller distanse per lading?

Det er sjelden du har ideelle kjøreforhold – glatte, flate, harde kjøreflater uten vind eller svinger. Ofte vil du møte bakker, sprekker i veibanen, ujevne og løse overflater, svinger og vind, som alle påvirker kjørelengden per batterilading. Nedenfor er noen forslag for å oppnå maksimal rekkevidde per batterilading.

- Lad alltid batteriene til Travel Scooter fullstendig før daglig bruk.
- Begrens bagasjevekten til det aller nødvendigste.
- Forsøk å holde en jevn hastighet mens Travel Scooter er i bevegelse.
- Unngå å stoppe og starte.

N. BATTERIER OG LADING



ADVARSEL! Batteriene inneholder etsende kjemikalier. Bruk kun AGM- eller gelcellebatterier for å redusere risikoen for

lekkasje eller eksplosive forhold.

MERK: Forseglede batterier kan ikke repareres. Ikke fjern lokkene.

Hvordan skifter jeg batteri i min reisescooter?



OBLIGATORISK! Batteripoler, terminaler og tilhørende tilbehør inneholder blyforbindelser.

Bruk vernebriller og hansker når du håndterer batterier, og vask hendene etterpå.



ADVARSEL! Bruk alltid to batterier av nøyaktig samme type, kjemisk sammensetning og ampere-time (Ah) kapasitet. Se

spesifikasjonstabellen i denne håndboken og i håndboken som følger med
bat

teriladeren for anbefalt type og kapasitet.




ADVARSEL! Ikke bland gamle og nye batterier. Bytt alltid ut begge batteriene samtidig.

ADVARSEL! Kontakt leverandøren din hvis du har spørsmål om batteriene i reisescooteren din.

ADVARSEL! Ikke bytt batteriene mens reisescooteren er i bruk. **ADVARSEL!** Batteriene på reisescooteren din skal kun vedlikeholdes eller byttes av en autorisert leverandør eller en kvalifisert tekniker.

1. Fjern batteripakken fra reisescooteren.
2. Vend pakken forsiktig opp ned.
3. Fjern de åtte (8) skruene fra omkretsen av batteripakken.
4. Vend pakken forsiktig med rett side opp og fjern lokket.
5. Koble de svarte (-) og røde (+) batterikablene fra batteripolene på hvert av batteriene: Se figur 14.
6. Fjern de gamle batteriene.
7. Sett de nye batteriene inn i batteripakken.
8. Koble den røde batterikabelen til den positive (+) batteripolen på hvert batteri

IV. BATTERIER OG LADING

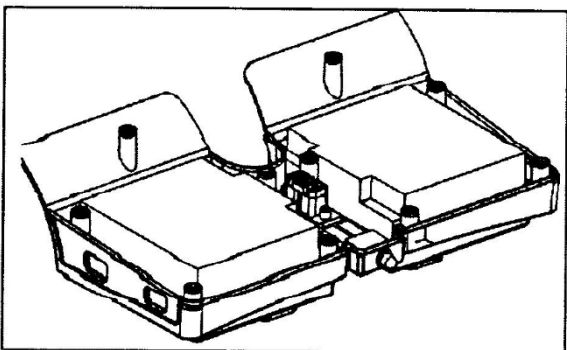

Figur 14. Batteribytte.

9. Koble den svarte batterikabelen til den negative (-) batteripolen på hvert batteri.
10. Sett lokket tilbake på batteripakken og sørg for at alle ledninger er inne i pakken, slik at de ikke blir klemte.
11. Vend pakken forsiktig opp ned. 12. Sett alle skruene på plass igjen og stram til.

MERK: 17Ah-batterier krever at en mutter og bolt fjernes når batterikabelen kobles fra batteriterminalen.

MERK: Hvis du oppdager et skadet eller sprukket batteri, må du umiddelbart legge det i en plastpose og kontakte din lokale avfallsmyndighet eller autoriserte leverandør for instruksjoner om avhending og gjenvinning av batterier, som er vår anbefalte fremgangsmåte.

Hvorfor virker de nye batteriene mine svake?

Deep-cycle-batterier bruker en annen kjemisk teknologi enn den som brukes i bilbatterier, nikkel-kadmiumbatterier (Nicads) og andre vanlige batterityper. Deep-Cycle-batterier er spesielt designet for å levere strøm, tømme ladningen og deretter akseptere en relativt rask opplading (8 til 14 timer).

Vi samarbeider tett med batteriprodusenten for å tilby batterier som passer best til de spesifikke elektriske kravene til din reisescooter. Nye batterier sendes fulladet til våre kunder. Under transporten kan batteriene utsettes for ekstreme temperaturer som kan påvirke deres opprinnelige ytelse. Varme reduserer batteriets ladning, mens kulde reduserer den tilgjengelige strømmen og forlenger tiden det tar å lade batteriet.

IV. BATTERIER OG LADING

Det kan ta noen dager før temperaturen på batteriene til Travel Scooter stabiliserer seg og tilpasser seg den nye rom- eller omgivelsestemperaturen. Enda viktigere er det at det tar noen ladingssykluser (delvis utlading etterfulgt av full opplading) for å oppnå den kritiske kjemiske balansen som er avgjørende for at et dypcykelbatteri skal yte maksimalt og ha lang levetid.

Følg disse trinnene for å kjøre inn de nye batteriene til Travel Scooter på riktig måte for maksimal effektivitet og levetid.

1. Lad alle nye batterier fullstendig før første gangs bruk. Denne ladesyklusen bringer batteriet opp til omtrent 88 % av sitt maksimale ytelsesnivå.
2. Bruk den nye Travel Scooteren i kjente og trygge områder. Kjør sakte i begynnelsen, og ikke kjør for langt fra hjemmet eller kjente omgivelser før du har blitt vant til kontrollene på Travel Scooteren og har kjørt inn batteriene på riktig måte.
3. Lad batteriene helt opp. De bør være på over 90 % av sitt maksimale ytelsesnivå.
4. Bruk reisescooteren din igjen.
5. Lad batteriene helt opp igjen.
6. Etter fire eller fem ladingssykluser kan batteriene lades opp til 100 % av sin maksimale ytelse og holde seg i lang tid.

Hva med offentlig transport?

Hvis du har tenkt å bruke offentlig transport med Travel Scooter, må du kontakte transportselskapet på forhånd for å finne ut hvilke krav de har.

V. BRUK

FØR DU SETTER DEG PÅ TRAVEL SCOOTEREN

- Har du ladet batteriene fullstendig? Se IV. «Batterier og lading»
- Er den manuelle friløpshendelen i kjøremodus (bakover)? La aldri den manuelle friløpshendelen stå i fremoverposisjon med mindre du skyver manuelt. Reisescooteren din.
- Sørg for at rorknappen er i ulåst posisjon. Se VII. «Demontering og montering».

V.BRUK

Å SETTE SEG PÅ REISESKUTEREN.

1. Forsikre deg om at nøkkelen er fjernet fra nøkkelbryteren.



ADVARSEL! Forsøk aldri å sette deg på eller gå av reisescooteren uten først å fjerne nøkkelen fra nøkkelbryteren.

Dette forhindrer at reisescooteren beveger seg hvis gasspaken ved et uhell kommer i kontakt med den.

2. Stå ved siden av reisescooteren.
3. Løsne setets rotasjonsspak og roter setet til det vender mot deg.
4. Sørg for at setet er festet på plass.
5. Sett deg komfortabelt og sikkert i setet.
6. Løsne setets rotasjonsspak og roter setet til du sitter vendt fremover.
7. Forsikre deg om at setet er festet i riktig posisjon.
8. Forsikre deg om at føttene står sikkert på gulvet.

JUSTERINGER OG KONTROLLER FØR KJØRING

- Er setet i riktig høyde? Se VI. «Komfortjusteringer».
- Er setet festet på plass?
- Er roret i en komfortabel posisjon og festet på plass? Se VI. «Komfortjusteringer».
- Er nøkkelen helt satt inn i nøkkelbryteren og dreid med klokken til «på»-posisjon?
- Fungerer hornet på reisescooteren som det skal?
- Er den planlagte ruten fri for mennesker, dyr og hindringer?
- Har du planlagt ruten din slik at du unngår ugunstig terreng og så mange stigninger som mulig?

BRUK AV REISESKUTEREN



ADVARSEL! Følgende kan påvirke styringen og stabiliteten negativt når du bruker reisescooteren

- Holde fast i eller feste et bånd for å gå tur med kjæledyret ditt.
- Å frakte passasjerer (inkludert kjæledyr)
- Henge noen gjenstander på roret.

V.DRIFT

■ **Å bli tauet eller dyttet av et annet motorisert kjøretøy. Slike handlinger kan føre til tap av kontroll og/eller velting, noe som kan resultere i personskader.**

Hold begge hendene på styret og føttene på golvplaten hele tiden mens du kjører Travel Scooter. Denne kjørestillingen gir deg best mulig kontroll over kjøretøyet.

■ Still inn hastighetsregulatoren til ønsket hastighet.

■ Trykk tommelen mot den aktuelle siden av gassreguleringsspaken.

■ Den elektromekaniske skivebremsen kobles automatisk ut, og Travel Scooter akselererer jevnt til den hastigheten du har valgt med hastighetsregulatoren.

■ Trekk i venstre håndtak for å styre Travel Scooter til venstre.

■ Trekk i høyre håndtak for å styre Travel Scooter til høyre.

■ Flytt styret til midtposisjon for å kjøre rett frem.

■ For å stoppe, slipp gasspaken sakte. De elektroniske bremsene aktiveres automatisk når Travel Scooter stopper.

MERK: Travel Scooterens bakoverhastighet er lavere enn den forhåndsinnstilte fremoverhastigheten du har valgt med hastighetsregulatoren.

Å STIGE AV TRAVEL SCOOTEREN

1. Stopp Travel Scooter helt.
2. Ta nøkkelen ut av nøkkelbryteren.
3. Løsne setets rotasjonsspak og roter setet til du vender mot siden av Travel Scooter.
4. Forsikre deg om at setet er festet i riktig posisjon.
5. Stå forsiktig og trygt ut av setet og stå ved siden av Travel Scooter.
6. Du kan la setet stå vendt mot siden for å gjøre det lettere å sette deg på reisescooteren neste gang.

STRØMSPARINGSTIMER

Reisescooteren din er utstyrt med en energisparende automatisk avstengningstimer som er designet for å spare batteriet på reisescooteren din. Hvis du ved en feiltakelse lar nøkkelen stå i nøkkelbryteren og i «på»-posisjon, men ikke bruker reisescooteren din i omtrent 20 minutter, vil kontrolleren på reisescooteren

V.DRIFT

Slås automatisk av. Hvis avstengningstimerfunksjonen trer i kraft, utfør følgende trinn for å gjenoppta normal drift.

1. Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren.
2. Sett nøkkelen inn igjen og slå på Travel Scooter.

VI KOMFORT JUSTERINGER

TILLERVINKEL JUSTERING



ADVARSEL! Fjern nøkkelen fra nøkkelbryteren før du justerer rattet eller setet. Forsøk aldri å justere rattet eller setet

mens reisescooteren er i bevegelse.


Reisescooteren din er utstyrt med en justerbar svingbar ror.

1. Mens du støtter rattet, vri rattjusteringsknappen mot klokken for å løsne rattet.

Se figur 15.

2. Flytt rattet til en behagelig posisjon.

3. Drei justeringsknappen for rattet med klokken for å feste rattet i posisjon.

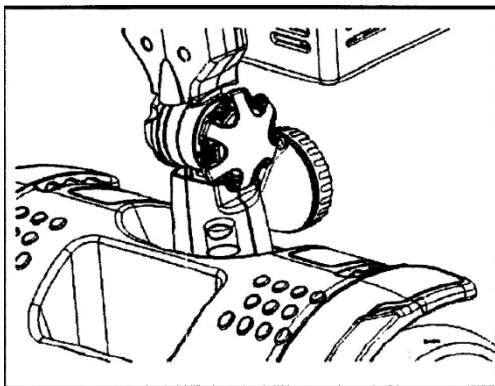


Figur 15. Justeringsknott for styre.

MERK: For å senke styret helt, må du først fjerne setet og batteripakken. Fjern setet ved å trekke det rett opp og av Travel Scooter.

JUSTERING AV SETEROTASJON

Setets rotasjonsspak, som er plassert på høyre side av setet

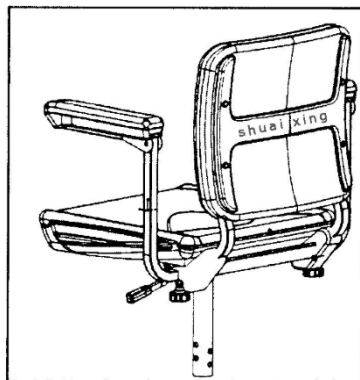

Figur 16. Sete

VI KOMFORTJUSTERINGER

Basen fester setet i flere posisjoner.

1. Trekk opp setets rotasjonsspak for å løsne setet.
2. Drei setet til ønsket posisjon.
3. Slipp spaken for å feste setet på plass.

JUSTERING AV ARMLENEBREDD


Armlenets bredde kan justeres innover eller utover.

1. Løsne justeringsknappene for armlenet. Se figur 16.
2. Bruk den medfølgende ringen til å trekke ut og fjerne låsepinnene.
3. Skyv armlenene inn eller ut til ønsket bredde.
4. Juster justeringshullene på seterammen og armlenet, og sett deretter tilbake låsepinnene.
5. Stram armlenets justeringsknapper.


MERK: Vipp armlenene oppover for å gjøre det lettere å sette seg på og av Travel Scooter.

Justering av setehøyde

Setet kan justeres til forskjellige høyder. Se figur 17.

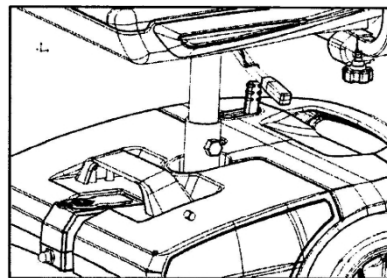

Figur 17. Justering av setehøyde

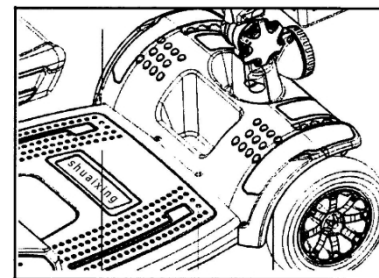

Figur 18. Oppbevaringsrom foran.

1. Fjern setet og batteripakken fra Travel Scooter.
2. Bruk den vedlagte ringen til å trekke ut og fjerne låsepinnen fra den nedre setepinnen.
3. Hev eller senk den øvre setepinnen til ønsket setehøyde.
4. Mens du holder den øvre setepinnen i den høyden, justerer du justeringshullene på den øvre og nedre setepinnen.
5. Sett låsepinnen helt inn
6. Sett batteripakken og setet på plass igjen.

VI KOMFORTJUSTERINGER

FRONTOPPBEVARINGSOMRÅDE


Reisescooteren din er utstyrt med et oppbevaringsrom foran som kan fjernes hvis du trenger ekstra ben- eller fotplass. **Se figur 18.** Fjern skruene for å skille den lille kurven fra reisescooteren.

MERK: Som en forholdsregel bør du unngå å legge lommebøker, nøkler eller verdisaker i oppbevaringsområdet.

VII. DEMONTERING OG MONTERING AV

DEMONTERING

Du kan demontere Travel Scooter i fire deler: setet, rammen, kurven og batteripakken. **Se figur 19.**

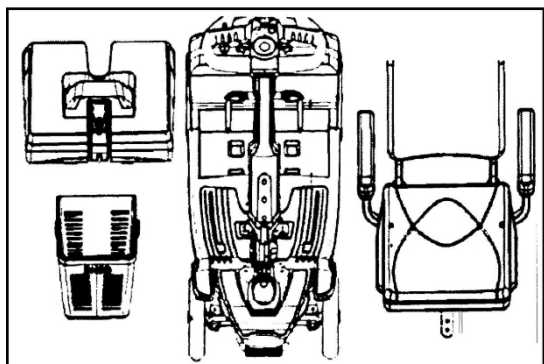

Figur 19. Demontert Travel

Det kreves ingen verktøy for å demontere eller montere Travel Scooter. Demonter eller monter alltid Travel Scooter på et jevnt, tørt underlag med tilstrekkelig plass til å arbeide og bevege deg – omtrent 1,5 meter i alle retninger. Husk at noen av komponentene til Travel Scooter er tunge, og at du kan trenge hjelp til å løfte dem. Det kreves ingen verktøy for å demontere eller montere Travel Scooter. Demonter eller monter alltid Travel Scooter på et jevnt, tørt underlag med tilstrekkelig plass til å arbeide og bevege deg – omtrent 1,5 meter i alle retninger. Husk at noen av komponentene til Travel Scooter er tunge, og at du kan trenge hjelp til å løfte dem.

VII. DEMONTERING OG MONTERING



ADVARSEL! Løft ikke vekt som overstiger din fysiske kapasitet. Be om hjelp når det er nødvendig under demontering eller

montering av reisescooteren.

1. Fjern setet ved å løfte det rett opp og av Travel Scooter. Hvis du møter motstand når du fjerner setet, løsner du setets rotasjonsspak og svinger setet frem og tilbake mens du løfter opp setet.
2. Fjern batteripakken fra reisescooteren.

Rammeseparasjon

1. Senk styret og stram den høyere justeringsknappen.

MONTERING

1. Løft styret og stram justeringsknappen for styret helt.
2. Sett batteripakken på plass igjen.
3. Sett setet på plass igjen og vri det til det sitter fast.

VIII. GRUNNLEGGENDE FEILSØKING AV .

Alle elektromekaniske enheter krever av og til feilsøking. De fleste problemene som kan oppstå, kan imidlertid vanligvis løses med litt ettertanke og sunn fornuft. Mange av disse problemene oppstår fordi batteriene ikke er fulladet eller fordi batteriene er utslitte og ikke lenger kan holde på ladningen.

DIAGNOSTISKE PIPEKODER

Diagnosetone-kodene for Travel Scooter er utformet for å hjelpe deg med å utføre grunnleggende feilsøking raskt og enkelt. En diagnosetone-kode vil høres hvis en av forholdene nedenfor oppstår.

MERK: Reisescooteren din vil ikke kjøre før pipekodevilkårene er løst og reisescooteren har blitt slått av og på igjen.

Hva gjør jeg hvis alle systemene på min Travel Scooter virker å være «døde»?

- Forsikre deg om at nøkkelen er i «på»-posisjon.
- Kontroller at batteriene er fulladet.
- Trykk inn reset-knappen på hovedbryteren. Se III. «Reisescooteren din».
- Forsikre deg om at strømsparingsfunksjonen ikke er aktivert


VIII. GRUNNLEGGENDE FEILSØKING.

Se V. «Drift».


■ Kontroller sikringen til styrescooterkonsollen som ligger under batteripakken.

Slik sjekker du en sikring:

1. Fjern sikringen ved å trekke den ut av sporet.
2. Undersøk sikringen for å sikre at den er gått. Se figur 20 og 21
3. Sett inn en ny sikring med riktig styrke.

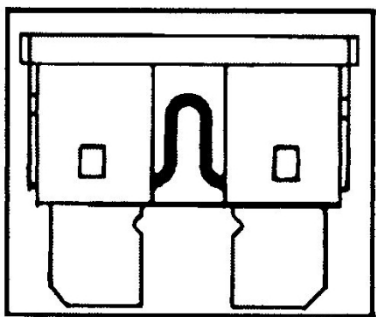

figur 20. Fungerende sikring

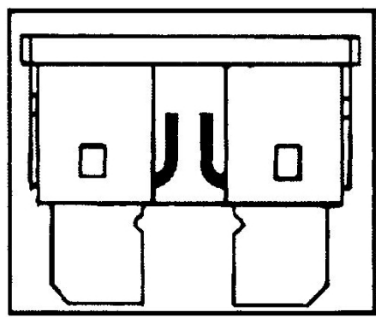

figur 21. Gjennombrutt sikring



ADVARSEL! Erstatningssikringen må ha nøyaktig samme styrke som den gamle sikringen. Hvis du ikke bruker sikringer med riktig styrke, kan det føre til

skade på det elektriske systemet

Hva gjør jeg hvis batteriene til reisescooteren ikke lades?

- Kontroller sikringen på batteripakken. Bytt den ut om nødvendig.
- Hvis LED-lampene på laderen ikke indikerer full lading under ladeprosessen, må du kontrollere sikringen på batteripakken og skifte den om nødvendig.
- Sørg for at begge ender av laderenes strømkabel er helt innstøpt.
- Hvis batteripakkens sikring stadig går, må du kontakte vår autoriserte leverandør for service.

Hva gjør jeg hvis reisescooteren ikke beveger seg når jeg trykker på gasspaken?

- Når den manuelle friløpsspaken skyves fremover, kobles bremsene ut og all strøm til motor/transaksling blokkeres.
- Trekk tilbake den manuelle friløpsspaken, slå av scooteren, og deretter

VIII. GRUNNLEGGENDE FEILSØKING

på igjen for å gå tilbake til normal drift.

Hva gjør jeg hvis hovedbryteren utløses gjentatte ganger?

- Hvis hovedbryteren utløses gjentatte ganger, kontakt din autoriserte servicepartner.
 - Lad reisens scooters batterier oftere. Se IV. «Batterier og lading».
 - Hvis problemet vedvarer, må du få begge batteriene til reisescooteren testet av en autorisert leverandør.
 - Du kan også utføre belastningstesten selv. Batteribelastningstestere er tilgjengelige hos de fleste bilforretninger.
 - Følg instruksjonene som følger med belastningstesteren.
 - Se IV. «Batterier og lading» eller «Tillegg I-spesifikasjoner» for informasjon om batteritypen til din reisescooter.
- Hva gjør jeg hvis batterimåleren synker kraftig og motoren rykker eller nøler når jeg trykker på gasspaken?
- Lad batteriene til reisescooteren din helt opp. Se IV. «Batterier og lading».
 - Be din autoriserte leverandør om å utføre en belastningstest på hvert batteri.
 - Eller se forrige feilsøkingsspørsmål for å teste batteriene selv. Hvis du opplever problemer med reisescooteren din som du ikke klarer å løse, må du umiddelbart kontakte din autoriserte leverandør for informasjon om vedlikehold og service.

IX. VEDLIKEHOLD OG SERVICE

Reisescooteren din krever minimalt med pleie og vedlikehold. Hvis du ikke føler deg trygg på å utføre vedlikeholdet som er beskrevet nedenfor, kan du bestille inspeksjon og vedlikehold hos din Inspiser regelmessig dekkene på reisescooteren din for tegn på slitasje.

UTVENDIGE OVERFLATER

Støtfangere, dekk og lister kan ha nytte av å bli behandlet med gummi- eller vinylbalsam av og til.



ADVARSEL! Ikke bruk gummi- eller vinylbalsam på reisescooteren. Scooters vinylsete eller dekkmonster, da de vil bli farlig glatt.

VIII. GRUNNLEGGENDE FEILSØKING

■ ■ (2)	Batterispenningen er for lav til å kunne bruke reisescooteren	Lad helt opp til laderen og eventuelle målere indikerer at ladingen er fullført.
■ ■ ■ (3)	Batterispenningen er for høy til å kunne bruke Travel Scooter	Kontakt din autoriserte leverandør for hjelp.
■ ■ ■ ■ ■ (5)	Solenodbremsen har utløst. Den manuelle friløpsspaken kan være i friløpsposisjon posisjon.	Fjern nøkkelen, skyv den manuelle friløpsspaken til kjøremodus og start Travel Scooter på nytt.
■ ■ ■ ■ ■ ■ (6)	Gasspådrag. Gasspådragsspaken kan ha blitt trykket ned mens nøkkelen ble satt inn	Slipp gassreguleringsspaken helt. Sett deretter nøkkelen inn igjen.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (7)	Gasspedalen har utløst. Gasspedalen kan ha blitt trykket ned mens nøkkelen ble satt inn	Kontakt din autoriserte leverandør for hjelp.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (8)	Motoren til reisescooteren er koblet fra	Kontakt din autoriserte leverandør for hjelp.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (9)	Mulig utløsning av kontrolleren. Du prøver kanskje å installere batteripakken mens nøkkelen er satt inn, eller motorcontrolleren kan være i overopphetingsmodus beskyttelsesmodus	Slå av reisescooteren i minst flere minutter for å la kontrolleren avkjøles, eller prøv å sette nøkkelen inn i nøkkelbryteren på nytt.

IX. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

RENGJØRING OG DESINFISERING

Bruk en fuktig klut og et mildt, ikke-slipenderengjøringsmiddel til å rengjøre plast- og metalldelene på reisescooteren. Unngå å bruke produkter som kan ripe opp overflaten på reisescooteren.

Rengjør produktet med et godkjent desinfeksjonsmiddel om nødvendig. Forsikre deg om at desinfeksjonsmidlet er trygt å bruke på produktet før du bruker det.



ADVARSEL! Følg alle sikkerhetsinstruksjoner for riktig bruk av desinfeksjonsmiddelet og/eller rengjøringsmidlet før du bruker det på produktet ditt.

produkt. Manglende overholdelse kan føre til hudirritasjon eller for tidlig slitasje på polstring og/eller overflatebehandlingen på Travel Scooter.

BATTERIKLEMMEKONNEKTORER

Sørg for at terminalforbindelsene er tette og ikke er korroderte.

KABELBUNTER

Kontroller regelmessig alle ledningsforbindelser.

Kontroller regelmessig all ledningsisolasjon, inkludert ladekabelen, for slitasje eller skader.

Få din autoriserte leverandør til å reparere eller erstatte eventuelle skadede kontakter, tilkoblinger eller isolasjon før du bruker Travel Scooter igjen.



FORBUDT! Selv om Travel Scooter har bestått de nødvendige testkravene for væskeinntrengning, bør du

Hold elektriske tilkoblinger borte fra fuktighetskilder, inkludert direkte eksponering for vann eller kroppsvæsker og inkontinens. Kontroller elektriske komponenter regelmessig for tegn på korrosjon og bytt dem ut om nødvendig.

ABS-PLASTIKKDEKSLER

Dekselene er laget av slitesterk ABS-plast og er belagt med en avansert uretanmaling. En lett påføring av bilvoks vil bidra til at dekslene beholder sin høye glans.

AKSELLAGER OG MOTOR/TRANSAKSELENHET

Disse delene er alle forhåndssmurt, forseglet og krever ingen etterfølgende smøring.

IX. VEDLIKEHOLD OG STELL

MOTORBØRSTER

Motor børstene er plassert inne i motor-/transakslenheten. De bør inspiseres regelmessig for slitasje av din autoriserte leverandør.

KONSOLL, LADER OG BAKRE ELEKTRONIKK

Hold disse områdene fri for fuktighet.

La disse områdene tørke grundig hvis de har vært utsatt for fuktighet før du bruker Travel Scooter igjen.

UTSKIFTING AV NYLONLÅSMUTTER

Alle nyloninnsatslåsescuttere som fjernes under periodisk vedlikehold, montering eller demontering av reisescooteren, må erstattes med en ny mutter.

Nyloninnsatslåsescuttere bør ikke gjenbrukes, da dette kan forårsake skade på nyloninnsatsen og føre til mindre sikker passform. Erstatningsnyloninnsatslåsescuttere er tilgjengelige i lokale jernvareforretninger eller gjennom vår autoriserte leverandør.

OPPBEVARING AV REISESKUTEREN

Hvis du ikke har tenkt å bruke reisescooteren din på en stund, er det best å:

1. Lad batteriene helt opp før oppbevaring.
2. Fjerne batteripakken fra reisescooteren.
3. Oppbevare reisescooteren i et varmt og tørt miljø.
4. Unngå å oppbevare reisescooteren på steder hvor den vil bli utsatt for ekstreme temperaturer.

Batterier som regelmessig og fullstendig lades ut, sjelden lades, oppbevares i ekstreme temperaturer eller oppbevares uten full lading, kan bli permanent skadet, noe som kan føre til upålitelig ytelse og begrenset levetid. Det anbefales at du lader batteriene til reisescooteren med jevne mellomrom under lengre oppbevaringsperioder for å sikre riktig ytelse.



ADVARSEL! Beskytt alltid batteriene mot frost og lad aldri et frossent batteri.

Ved lengre tids oppbevaring kan det være lurt å legge flere brett under rammen på Travel Scooter for å løfte den opp fra bakken. Dette avlaster vekten på dekkene og reduserer risikoen for at det oppstår flate flekker på de delene av dekkene som er i kontakt med bakken.

IX. VEDLIKEHOLD OG STELL

AVHENDING AV SCOOTEREN

Reisescooteren din må kastes i henhold til gjeldende lokale og nasjonale lovbestemmelser. Kontakt ditt lokale avfallsselskap eller din autoriserte leverandør for informasjon om riktig avhending av emballasje, metallrammekomponenter, plastkomponenter, elektronikk og batterier.

X. GARANTI

FEM ÅRS BEGRENSET GARANTI

I fem år fra kjøpsdatoen vil vi, etter eget valg, reparere eller erstatte følgende deler til den opprinnelige kjøperen, dersom en autorisert representant for oss etter undersøkelse finner at de har material- og/eller produksjonsfeil:

Strukturelle rammekomponenter, inkludert:

■ Plattform ■ Gaffel ■ setepinne ■ rammesveiser

TO ÅRS BEGRENSET GARANTI

Alle elektroniske deler, inkludert kontrollere og batteriladere, har to (2) års garanti. Service på kontrolleren eller batteriladeren må utføres av din autoriserte leverandør. Ethvert forsøk på å åpne eller demontere disse delene medfører at garantien på den aktuelle delen blir ugyldig.

EN ÅRS BEGRENSET GARANTI

I ett år fra kjøpsdatoen vil vi, etter eget valg, reparere eller erstatte følgende deler til den opprinnelige kjøperen, dersom en autorisert representant for oss ved undersøkelse finner at de har material- og/eller produksjonsfeil: Drivverk, inkludert:

■ differensial ■ m o t o r ■ brems

SEKS MÅNEDERS GARANTI

Batteriene er dekket av en separat seks (6) måneders garanti fra batteriproduzenten. Gradvis forringelse av ytelsen på grunn av at batteriet har blitt liggende i utladet tilstand, blitt liggende i kalde omgivelser i lange perioder eller blitt slitt ut på grunn av intensiv bruk, dekkes ikke av garantien.

GARANTI FOR REKONDISJONERTE ENHETER

Alle rekondisjonerte enheter er dekket av en seks måneders garanti fra oss, gjeldende fra kjøpsdatoen.

x. GARANTI

GARANTIUNNSLUTNINGER

Denne garantien gjelder ikke for deler som må skiftes ut på grunn av normal slitasje.

■ ABS-plastdeksler ■ Dekk og lyspærer ■ Polstring og seter.

■ Omstendigheter utenfor vår kontroll.

■ Arbeidskraft, servicebesøk, frakt og andre kostnader knyttet til produktet, med mindre dette er spesifikt godkjent på forhånd av vårt mobilitetsproduktselskap.

■ Reparasjoner og/eller modifikasjoner utført på noen del av reisescooteren uten spesifikk og forhåndsgodkjenning fra oss.

UNNTAK INKLUDERER OGSÅ KOMPONENTER MED SKADER FORÅRSAKET AV:

■ Forurensning

■ Misbruk, feil bruk, ulykke eller uaktsomhet.

■ Søl eller lekkasje av batterivæske

■ Kommersiell bruk eller bruk utover det normale

■ Feil bruk, vedlikehold eller oppbevaring

■ Batterier som ikke er vedlikeholdt i henhold til anbefalte lade- og

oppbevaringsprosedyrer

Det finnes ingen andre uttrykkelige garantier.

Implisitte garantier, inkludert garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, er begrenset til ett år fra datoen for det opprinnelige kjøpet og i den grad loven tillater det. Alle implisitte garantier er ekskludert. Dette er eksklusiv erstatning. Ansvar for følgeskader under alle garantier er ekskludert.

Noen stater tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, eller tillater ikke utelukkelse av begrensning av tilfeldige eller følgeskader. Derfor gjelder kanskje ikke ovennevnte begrensning eller utelukkelse for deg.

VEDLEGG I – SPESIFIKASJON

Modellnumre	Blimo X-40
Maksimal sikker helling	Se figur 1.
Maksimal klatreevne	Se figur 1.
Maksimal hindring klatre evne	2 tommer (5 cm)
Farger	Rød, blå, sølv (utsiftbare paneler)
Total lengde	110 cm
Total bredde	51 cm
Totalvekt uten batterier	41,2 kg
Tungeste stykke når den er demontert (frontseksjon)	29,2 kg
Svingradius	125 cm
Hastighet (maksimal)	Variabel opp til 6 km/t
Rekkevidde per lading	(med 20 Ah batterier) opptil 28 km
Bakkeklaring	8,2 cm ved midten av rammen
Vektkapasitet	150 kg
Standard seter	Type: sammenleggbare
Drivsystem	Bakhjulsdrift, forseglede transaksling, 24 volt likestrøm motor, 250 W,
Dobbel bremsesystem	Elektronisk, regenerativt og elektromekanisk
Dekk	Type: solide Størrelse: 22 cm
Batteri	24 V 20 Ah litium (480 Wh)
Vekt på batteripakke	20 Ah: 4,3 kg
Batterilader	Ekstern lader