

# BLIMO

Bärbar & hopfällbar elektrisk rullstol



[www.blimo.se](http://www.blimo.se)



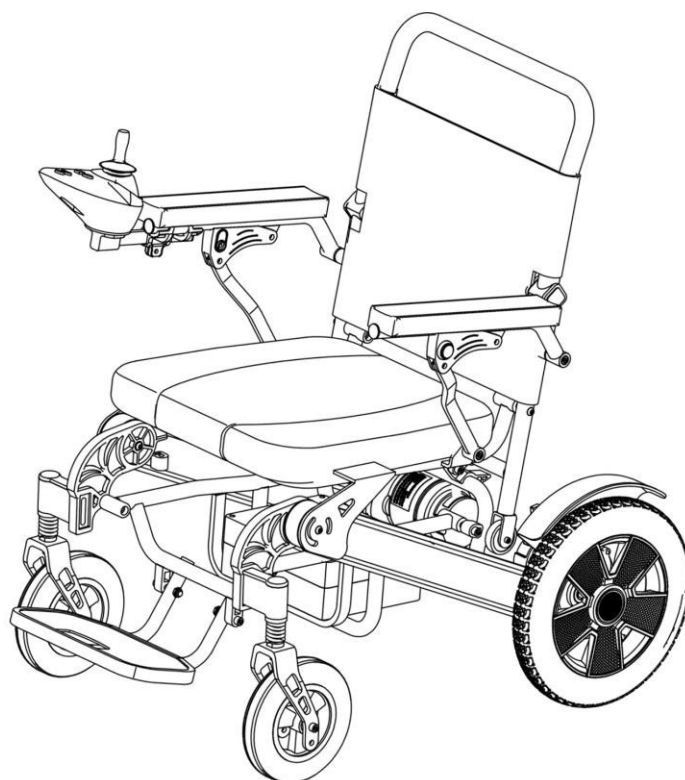
[www.blimo.dk](http://www.blimo.dk)



[www.blimo.no](http://www.blimo.no)



[www.blimo.fi](http://www.blimo.fi)



## Operatörshandbok

Innan du använder den elektriska rullstolen i BLIMO Move-serien ska du läsa igenom den här bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.



© Nordbutiker AB

Tack för att du valde denna elektriska rullstol

# - Move / Move Plus från **BLIMO**

Vårt mål är att du ska fortsätta att känna dig nöjd med ditt val av både leverantör och produkt. Din elrullstol är konstruerad för att ge högsta möjliga bekvämlighet och säkerhet samtidigt som den uppfyller miljökraven.

Bruksanvisningen är i första hand avsedd att ge dig kunskap om den elektriska rullstolens funktioner och egenskaper samt hur du använder den på bästa sätt. Den innehåller också viktig säkerhets- och underhållsinformation samt en beskrivning av eventuella problem som kan uppstå vid användning av elrullstolen.

Innan du börjar använda din elrullstol är det viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning och i synnerhet säkerhetsanvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen inom räckhåll när du använder din produkt, eftersom det kan uppstå behov av viktig information om användning, säkerhet och underhåll.

All information, alla bilder, illustrationer och specifikationer baseras på den produktinformation som fanns tillgänglig vid tidpunkten för tryckningen av denna bruksanvisning. Bilder och illustrationer som används denna bruksanvisning är representativa exempel och inte avsedda vara exakta av den elektriska rullstolens olika delar.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produkten utan föregående meddelande.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din återförsäljare som du köpte rullstolen av. Om du vill veta mer om oss och vårt sortiment av hjälpmedel för mobilitet och boende är du välkommen att besöka [www.blimo.se](http://www.blimo.se) / [www.blimo.dk](http://www.blimo.dk) / [www.blimo.no](http://www.blimo.no) [www.blimo.fi](http://www.blimo.fi)



[www.blimo.se](http://www.blimo.se)



[www.blimo.dk](http://www.blimo.dk)



[www.blimo.no](http://www.blimo.no)



[www.blimo.fi](http://www.blimo.fi)

# Index

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allmänt</b>                                            | <b>1</b>  |
| 1.1 Om bruksanvisningen                                      | 1         |
| 1.2 Avsedd användning                                        | 1         |
| 1.3 Symboler                                                 | 1         |
| <b>2. Säkerhetsinstruktioner</b>                             | <b>1</b>  |
| <b>3. Förpackningslista över standard elektrisk rullstol</b> | <b>2</b>  |
| <b>4. Lär känna din rullstol</b>                             | <b>2</b>  |
| 4.1 Översikt                                                 | 2         |
| 4.2 Tekniska specifikationer                                 | 4         |
| 4.3 Schema för elektrisk anslutning                          | 5         |
| <b>5. Förberedelser för användning</b>                       | <b>6</b>  |
| 5.1 Säkerhetsinstruktioner och praxis                        | 6         |
| 5.2 Fälla ut eller fälla ihop elrullstolen                   | 8         |
| 5.3 Uppfällbart armstöd                                      | 9         |
| 5.4 Uppfällbart fotstöd                                      | 10        |
| 5.5 Head Support                                             | 11        |
| 5.6 Electric Reclining                                       | 12        |
| 5.7 Installera och justera tippskydden                       | 13        |
| 5.8 Installation av styrenheten och dess fällbara stöd       | 14        |
| 5.9 Anslutning av kablar                                     | 14        |
| 5.10 Börja köra                                              | 14        |
| 5.11 Litiumbatteri, laddare och laddning                     | 15        |
| 5.12 Övriga presentationer                                   | 17        |
| <b>6. Styrenhet</b>                                          | <b>19</b> |
| 6.1 Styrenhet (SY-D)                                         | 19        |
| <b>7. Transport och förvaring rullstol</b>                   | <b>20</b> |
| 7.1 Transport och förvaring rullstol                         | 20        |
| 7.2 Flygtransporter                                          | 20        |
| <b>8. Underhåll och reparationer</b>                         | <b>20</b> |
| 8.1 Frekvens för underhåll och inspektion                    | 21        |
| 8.2 Verktygsväska                                            | 21        |
| 8.3 Rengöring                                                | 21        |
| <b>9. Felsökning</b>                                         | <b>22</b> |
| 9.1 Felsökningsguide                                         | 22        |
| 9.2 Felsökningsguide för styrenheten (SY-D)                  | 22        |
| <b>10. Begränsad garanti</b>                                 | <b>24</b> |
| <b>11. Symbolernas betydelse</b>                             | <b>25</b> |

# 1. Allmänt

## 1.1 Om bruksanvisningen

Producerad och publicerad av BLIMO  
Versionsnummer: 1.0  
Datum: 2025-12-30

Språk: SE  
Produkt: **Move**-serien

## 1.2 Avsedd användning

Den elektriska rullstolen är en stol utrustad med hjul, den är ett transportmedel för funktionshindrade, sjuka och handikappade.

## 1.3 Symboler

Följande symboler för fara, varning, försiktighet, anmärkning och information används i denna bruksanvisning för att uppmärksamma punkter som är viktiga ur säkerhetssynpunkt.

| Symbol                                                                              | Namn                | Beskrivning                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>FARA</b>         | Indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador på produkten eller annan egendom.                  |
|   | <b>VARNING</b>      | Indikerar en riskfylld situation som, om den inte undviks, kan leda till allvarliga personskador samt skador på produkten eller annan egendom.     |
|  | <b>FÖRSIKTIGHET</b> | Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador samt skador på produkten eller annan egendom. |
|  | <b>MEDDELANDE</b>   | Indikerar en viktig men inte farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på produkten eller annan egendom.                     |
|  | <b>INFORMATION</b>  | Ger användbara tips, rekommendationer och information för effektiv och problemfri användning.                                                      |

# 2. Säkerhetsinstruktioner

Läs och följ alla instruktioner och varningar i alla manualer som medföljer din elektriska rullstol och dess tillbehör. Felaktig användning kan både skada användaren och rullstolen. För att minska dessa risker ska du läsa bruksanvisningen, i synnerhet säkerhetsanvisningarna och deras varningstexter.

BLIMO ansvarar inte för person- eller egendomsskador som uppstår på grund av att någon inte följer varningarna och anvisningarna i denna bruksanvisning. BLIMO ansvarar inte för personskador eller skador som uppkommer på grund av bristande omdöme.

Det är också av yttersta vikt att du ägnar tillräckligt med tid åt att bekanta dig med rullstolens och tillbehörens olika knappar, funktioner, styrreglage etc. innan du börjar använda den.

Gör inte din första egna provkörning utan att se till att det finns hjälp i om du skulle behöva det.

### 3. Förpackningslista för standard elektrisk rullstol

|                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |  |
| <b>Move</b>                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Den bild som visas här är endast vägledande. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan bilden och den faktiska produkten, ska den faktiska produkten gälla |                                                                                     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Operator's Manual</p> <p>Operatörshandbok</p> |  <p>Armstödsväska * 2 st</p> | <p>Laddare</p>  | <p>Styrenhet</p>  | <p>Anti-Tip-anordning</p>  |
| <p>Litiumbatteri 24V12Ah (standard)</p> <p><u>Litiumbatteri 24V20Ah (tillval)</u></p>                                                |                                                                                                                 |                |                                                                                                        |                                                                                                                 |

## 4. Lär känna din rullstol

### 4.1 Översikt

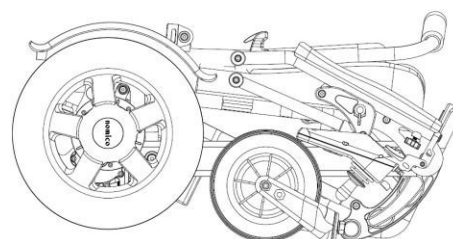


| Kod | Namn på huvudkomponenter | Kod | Namn på huvudkomponenter |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1   | Styrenhet                | 8   | Stöd för ryggen          |
| 2   | Sittdyna                 | 9   | Armstöd                  |
| 3   | Etikettens placering     | 10  | Styrenhetens drivrutin   |
| 4   | Batteri                  | 11  | Mudapron                 |
| 5   | Stöd för foten           | 12  | Rullstolsram             |
| 6   | Länkhjul                 | 13  | Anti-Tip-anordning       |
| 7   | Stång för lyfthandtag    | 14  | Drivhjul och motor       |

#### Karaktäristisk

Move-serien är elektriska bakhjulsdrivna rullstolar för utomhus- och inomhuskörning. Den använder 4-länkstruktur, kan vikas eller öppnas på 1 sekund.

Dess låga vikt och kompakta storlek gör den mycket lämplig som transportmedel för utomhusresor.








## 4.2 Tekniska specifikationer

### 4.2.1 Mått (Obs: Manuell mätning med litet fel, beroende på det verkliga objektet)
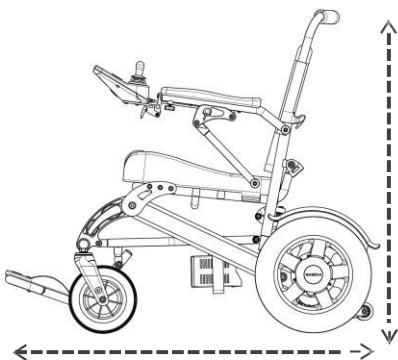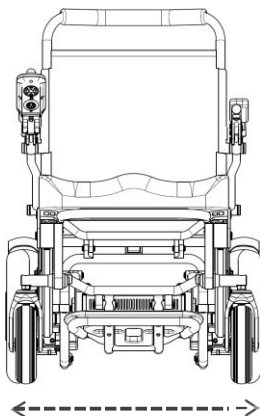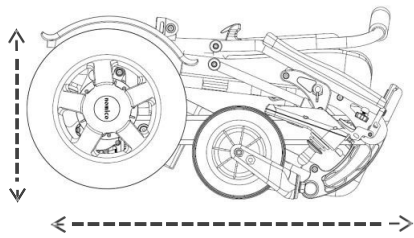
|                                | Move               |
|--------------------------------|--------------------|
| Sittbredd:                     | 450 mm             |
| Sittdjup:                      | 430 mm             |
| Sätesramens höjd vid :         | 435 mm             |
| Sittytans höjd vid framkanten: | 500 mm             |
| Ryggstödet bredd:              | 440 mm             |
| Ryggstödet höjd:               | 500 - 600 mm       |
| Avstånd mellan armstöden:      | 455 mm             |
| Armstöd till sits:             | 210 mm             |
| Fotstöd till sits:             | 320 mm             |
| Markfrigång:                   | 110 mm             |
| Hjulbas:                       | 550 mm             |
| Paketets storlek:              | 670 x 470 x 845 mm |

| Move                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Ryggstödet justerbart i höjdlid</p> |  |  |
| <p>Längd: 950 / 1190 mm<br/>Höjd: 960 - 1060 mm</p>                                                                       | <p>Bredd: 620 mm</p>                                                               | <p>Förvaringsstorlek<br/>Längd * Bredd * Höjd:<br/>620 * 400 * 770 / 810 mm</p>       |

### 4.2.2 Prestanda

|                               | Move        |
|-------------------------------|-------------|
| Max. viktkapacitet:           | 120 kg      |
| Max. hastighet:               | 6,0 km/h    |
| Max. körsträcka:              | 10Ah: 14 km |
|                               | 20Ah: 23 km |
|                               | 26Ah: 30 km |
| Max. kapacitet för sortering: | 12°         |
| Horisontell bromssträcka:     | ≤ 1.5 m     |
| Vridande diameter:            | 170 cm      |

#### 4.2.3 Elektriska komponenter

|                          | Move                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Borstad motor:           | 250W*2, DC24V                                             |
| Litiumbatteri (tillval): | 24V 12Ah/20Ah/26Ah                                        |
| Batteriets laddningstid: | 6-8 timmar                                                |
| Borstad styrenhet:       | SYD 24V                                                   |
| Automatisk broms:        | Elektromagnetisk broms                                    |
| Laddare DC-utgång:       | 24V2A eller 24V3A för 'Long Range' modell med 20A batteri |
| Laddare AC-ingång:       | 100 - 240V, 50/60Hz                                       |

#### 4.2.4 Ram och hjul

|                      | Move                                                       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Material i ramen:    | Aluminiumlegering                                          |
| Länkhjul:            | 8 tum                                                      |
| Drivhjul:            | 12 tums pneumatiskt däck ( <i>Däcktryck max. 2,5 bar</i> ) |
| Anti-Tip-enhet hjul: | 2 tum                                                      |

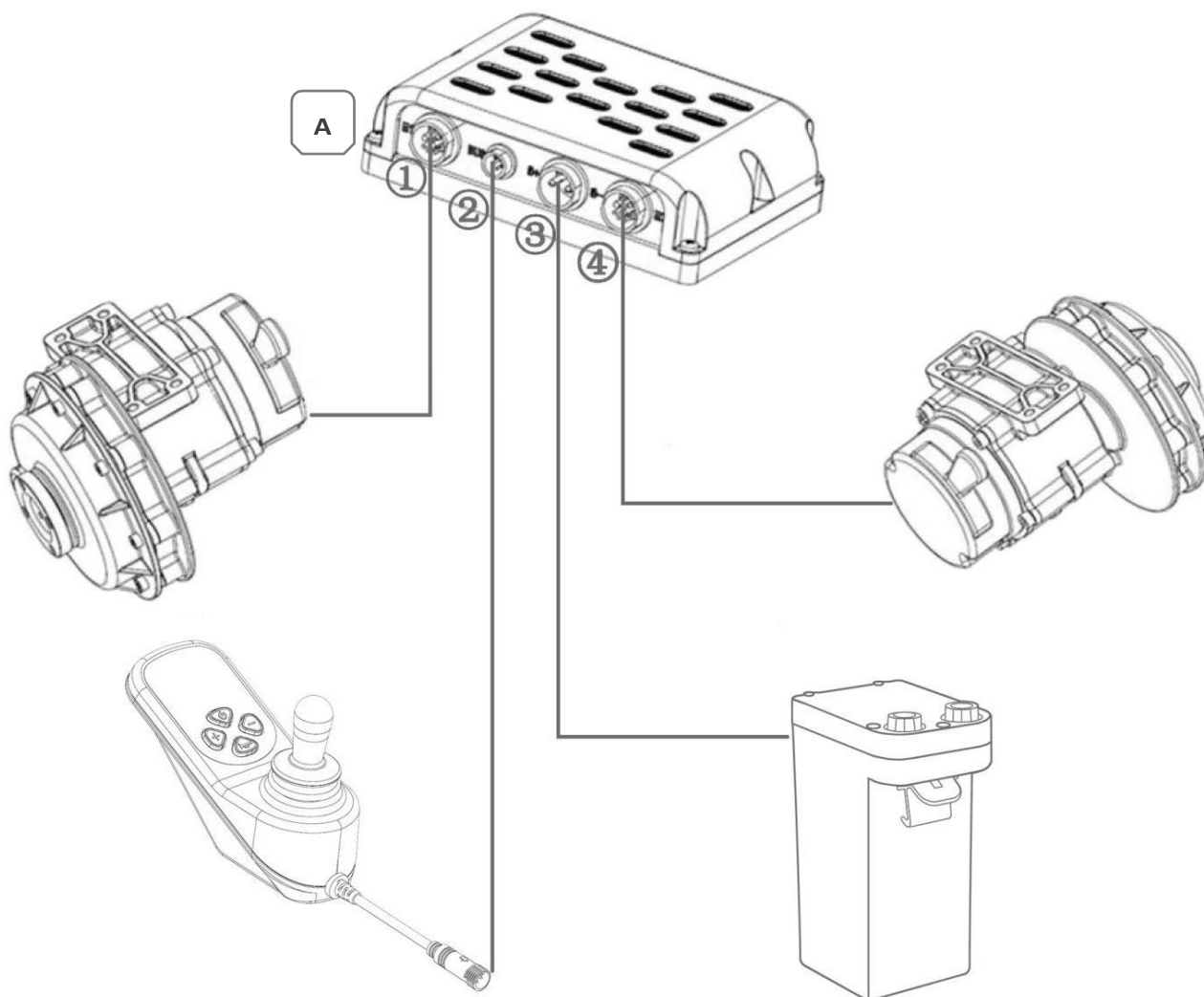
#### 4.2.5 Vikt

|                                     | Move    |
|-------------------------------------|---------|
| N.W. av rullstol:<br>(utan batteri) | 26 kg   |
| N.W. för litiumbatteri 12Ah:        | 3 kg/st |
| N.W. för litiumbatteri 20Ah:        | 4 kg/st |

#### 4.3 Elektriskt anslutningsschema

| Kod | Namn på huvudkomponenter         | Kod | Namn på huvudkomponenter       |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------|
| A   | Styrenhetens drivrutin           |     |                                |
| ①   | Anslut till <b>vänster</b> motor | ③   | Anslut till litiumbatteri      |
| ②   | Anslut till styrenheten          | ④   | Anslut till <b>höger</b> motor |





## 5. Förberedelser före användning

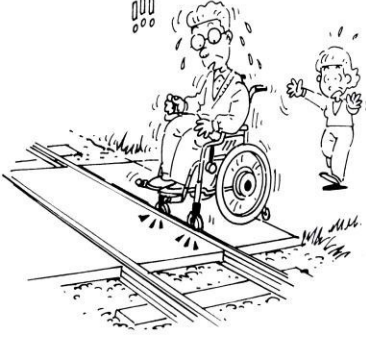
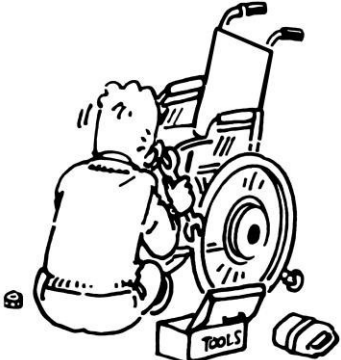
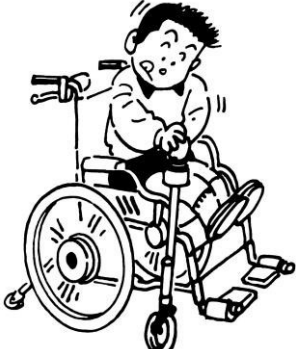
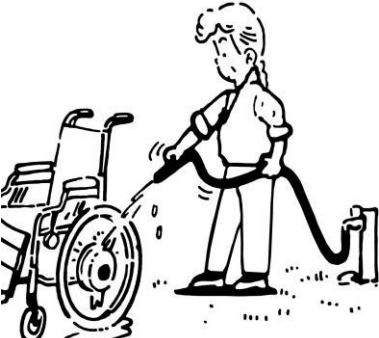
Rullstolen är konstruerad för att användas både inomhus och utomhus. Vid körning inomhus ska du vara försiktig i trånga passager, när du passerar genom dörrar och ingångar och när du använder hissar, ramper etc.


Vid körning utomhus ska du tänka på att köra mycket långsamt i branta sluttningar och vara mycket försiktig när du kör på ojämnt underlag, uppför sluttningar, i sidolutningar och över hinder. Håll alltid ett stort säkerhetsavstånd när du kör nära kanter och stup.

Vi rekommenderar att användarna gör upprepade provkörningar i miljöer där de känner sig trygga för att bekanta sig med hur rullstolen och dess tillbehör beter sig i olika situationer innan de börjar använda rullstolen på allmänna vägar och i andra offentliga utrymmen.

## 5.1 Säkerhetsinstruktioner och praxis

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                              |                                                                                 |
| <p>① Läs denna bruksanvisning tills du förstår och lär dig den elektriska rullstolens funktioner och egenskaper; Öva tills du har tillräcklig förmåga för att fungera.</p> | <p>① Föraren måste åtföljas av en vårdare när han eller hon kör rullstolen för första gången.</p>             | <p>① Tryck joysticken lätt framåt för att förflytta dig; Släpp joysticken för att stanna.<br/>①</p>                                                                |
|                                                                                          |                             |                                                                                |
| <p>① Tryck joysticken lätt bakåt för att förflytta dig bak; Släpp joysticken för att stanna.</p>                                                                           | <p>① Tryck lätt på joysticken för att göra en vänster- eller högersväng; Släpp joysticken för att stanna.</p> | <p>① Tryck lätt på joysticken för att öva på att undvika hinder och öva på hastighetskontrollen.</p>                                                               |
|                                                                                         |                            |                                                                               |
| <p>① Tryck lätt på joystickens riktning enligt kurvans riktning och öva hastighetskontrollen</p>                                                                           | <p>⚠ korsningssteget bör inte vara högre än 40 mm under normal körning och måste passeras långsamt</p>        | <p>⚠ <b>Snabb körning:</b> Tryck lätt på joysticken rakt fram och fortsätt att köra rakt fram. Vid denna tidpunkt, vänligen var vaksam och undvika kollisioner</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                            |
| <p>⚠ När du kör uppför lutningen lutar kroppen framåt för att hålla tyngdpunkten, medan du kör nedför lutningen, luta dig inte framåt snälla. Uppförsbacke och nedförsbacke måste vara långsamma, de lutningen bör vara mindre än 12°.</p> | <p>⚠ Operatören bör vara uppmärksam på hissdörrens öppnings- och stängningsintervall för att undvika en kollision när han går in eller ut ur hissen, för att undvika kollisioner.</p> | <p>⚠ Operatören korsar vägen eller gatan, bör vara på övergångsstället, var uppmärksam på steget, fotgängare och trafik.</p>                                                  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                           |
| <p>⚠ Operatören går ut, ska köra på trottoaren, inte på motorfilen.</p>                                                                                                                                                                    | <p>⚠ föraren måste åtföljas av en vårdare när han/hon är uppe eller nerför trappor eller högre trappsteg.</p>                                                                         | <p>⚠ föraren måste åtföljas av en vårdare när han/hon passerar järnvägen.</p>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                          |
| <p>ⓘ Det är förbjudet för användare att reparera utan tillstånd, och det måste av en professionell verkstad eller underhåll service personal.</p>                                                                                          | <p>⚠ Barn får inte leka med denna elektriska rullstol.</p>                                                                                                                            | <p>⚠ Förbjud att använda vatten för att skölja denna elektriska rullstol direkt, bör använda torr eller våt trasa för att rengöra, förbjudna att använda frätande vätska.</p> |
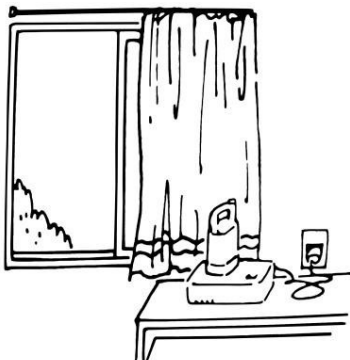
|                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                      |                                                                                               |
| <p>⚠ Batteriet måste hållas borta från regn och fukt. Det bör förvaras på en sval och ventilerad plats.</p> | <p>⚠ Barn får inte leka med batteriet, det måste förvaras på en plats där barn inte kan röra det.</p> | <p>⚠ Batteriet ska placeras på en sval, torr och väl ventilerad plats under laddning eller förvaring. Batteriet måste hållas borta från eld och värme källa, undvik direkt .</p> |

## 5.2 Fälla ut eller fälla ihop elrullstolen

Ta ut rullstolen ur kartongen.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>MEDDELANDE</b></p> <p>Kontrollera om kartongen är skadad innan du packar upp den och kontakta omedelbart din återförsäljare om det finns några skador. Om du köper på nätet är det ännu viktigare att noggrant kontrollera om kartongen är skadad under logistiken och transport.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2.1 Fäll ut elektrisk rullstol

| Det första sättet att fälla ut rullstolen                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                            |  |
| <p>Ställ dig bakom rullstolen, ta tag i handtaget med händerna, luta rullstolen långsamt framåt och lyft den upp på samma gång.</p> | <p>Fortsätt att lyfta upp den tills du hör ett klickljud när fjäderstiftet i mitten förs in i fästhållet.</p> | <p>Rullstolen kan enkelt fällas ut.</p>                                               |
| Det andra sättet att fälla ut rullstolen                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                       |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                       |  |
| <p>Ställ dig på sidan av rullstolen, håll i handtaget med ena handen och tryck sitsen nedåt med den andra handen.<br/>andra handen på samma gång.</p> | <p>Fortsätt att trycka sätet nedåt tills du hör ett klickljud när fjäderstiftet i mitten är isatt in i fästhållet.</p> | <p>Rullstolen kan enkelt fällas ut.</p>                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>VARNING</b><br/>Föraren måste kontrollera och bekräfta att skåpet i mitten är låst efter att rullstolen fällts ut, annars kan det leda till allvarliga personskador.<br/>skada på rullstolen eller annan egendom.</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2.2 Fällbar elektrisk rullstol

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                             |  |
| <p>Ställ dig på sidan av rullstolen, tryck på låsplattan med ena handen och skjut mot sitsen med en annan hand.</p> | <p>Fortsätt att stå på ena sidan av rullstolen, håll i handtaget med ena handen, ta tag i den främre delen av sitsramen med den andra handen och dra den mot ryggstödet tills rullstolen är helt hopfälld.</p> |                                                                                       |

### 5.3 Uppfällbart armstöd

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <p>Vänd knappen moturs för att låsa upp armstödet.</p>                            | <p>Dra i armstödet för att fälla upp bakåt.</p>                                   | <p>Tryck på armstödet nedåt för att sätta denna tillbaks neråt</p>                  |

### 5.4 Uppfällbart fotstöd

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>VARNING</b></p> <p>Använd inte fotplattorna som stöd när du förflyttar dig till eller från rullstolen. Den fotplattorna är inte konstruerade som lastbärande strukturer. Överdriven kraft kan leda person- eller egendomsskador, inklusive skador på rullstolen.</p> |

### 5.5 Nackstöd (Enbart Blimo Move Plus, eller kan köpas separat till Blimo Move)

|                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |    |  |
| <p>Montera nackstödet med klämman: anslut B (stor) port till ramen på nackstödet och S (liten) port till ryggstödsröret, och dra sedan åt skruvarna.</p> | <p>Tryck och håll in knappen på baksidan av nackstödet för att justera dess höjd.</p> | <p>Nackstödet lutning är justerbar.</p>                                               |

## 5.6 Elektrisk tilltfunktion (Endast Move Plus med denna funktion)

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                                  |   |
| <p>Move Plus levereras med nackstöd och controller SY-U som standardkonfiguration</p>                                                                | <p>Efter att ha slagit på strömmen, tryck och håll ner knappen längst ner till vänster tills lampan når mittenpositionen, släpp sedan.</p>                                                                        | <p>Tryck på bekräftelseknappen längst ner till höger.</p>                            |
|                                                                    |                                                                                                                                 |  |
| <p>Justera ryggstödet lutning med joysticken: dra den bakåt för att luta ryggstödet och tryck den framåt för att föra ryggstödet i upprätt läge.</p> | <p>Efter att ha parat fjärrkontrollen med kontrollenheten (se fjärrkontrollens manual), tryck på B-knappen för att bekräfta, och tryck sedan på ▽ för att luta ryggstödet eller △ för att ställa det upprätt.</p> | <p>Ryggstödet justeringsområde <math>\leq 125^\circ</math></p>                       |



## 5.7 Installera och justera tippskydden



Dra ut spärren ur tippskyddets rör.



Montera hjulramen och rikta in hålen på rören på tippskyddet anordning och hjulram.



2 positioner för justering. Installationsmetoden är densamma för vänster och höger.



#### **VARNING**

Låt tippskyddet vara monterat för att minska risken för tippning. Var alltid uppmärksam på sittpositionen och hur den kan påverka rullstolens stabilitet på olika underlag. även med tippskydd (särskilt i sluttningar).

### **5.8 Installation och justering av styrenheten**



För in i armstödet rör och lås.



Frigör låset och justerar styrenheten fram eller bak



#### **VARNING**

Använd aldrig styrenheten som handtag eller stöd, den är inte konstruerad som en lastbärande struktur. Överdriven kraft kan leda till person- eller egendomsskador, inklusive skada på rullstolen.

### **5.9 Anslutning av kablar**



Anslut vänster och höger motor till styrenheten



Anslut batteriet till styrenheten

### **5.10 Börja köra**

Kontrollera att styrenheten är korrekt monterad och att joysticken är i utgångsläget. Kontrollera att alla strömkablar är anslutna. Snabba svängar och körning på ojämnt underlag kan försämra din förmåga att hantera rullstolen på ett säkert sätt.

#### **5.10.1 Växla till körläge**



## MEDDELANDE

För specifik introduktion till driftgränssnittet, se "**6. Styrenhet**".

1. Växla rullstolen till köräge med handtagsspakarna (se höger bild);
2. Slå på strömmen med strömbrytaren på kontrollpanelen;
3. För joysticken försiktigt framåt för att köra framåt eller bakåt för att backa.
4. Justera hastighetsinställningen med knapparna för minskning och ökning av maxhastigheten. Rullstolens elektronik tillåter mycket långsam körning över hinder. Kör fram till hindret och kör sedan försiktigt över det.



### **VARNING: Placera fötterna korrekt**

Se alltid till att dina fötter är korrekt och säkert placerade på fotplattorna innan du använder rullstolen. Använd fotremmar om det behövs. Om du inte gör det ökar risken för personskador.



### **FÖRSIKTIGHET**

Gör inte den första provkörningen ensam. Provkörningen är avsedd att fastställa hur du och rullstolen fungerar tillsammans och du kan behöva hjälp.



### **VARNING**

Var mycket försiktig när du kör i sidosluttningar med ojämnt underlag (t.ex. gräs, grus, sand och snö).



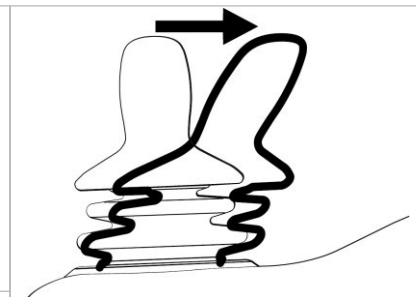
### **VARNING**

Om rullstolen rör sig på ett sätt som du inte vill, **släpp joysticken omedelbart!** Detta får alltid rullstolen att stanna oavsett vad den på med.

#### 5.10.2 Joystickfel vid uppstart

Flytta inte joysticken före, under eller omedelbart efter att styrsystemet har kopplats in. Om joysticken flyttas från utgångsläget kan det uppstå ett joystickfel.

Kontrollera att joysticken är i utgångsläget och slå sedan av och på rullstolen igen. Om detta inte fungerar och felkoden fortfarande visas ska du kontakta din återförsäljare.



#### 5.11 Litiumbatteri, laddare och laddning

Hur ofta du behöver ladda rullstolens batteri beror på ett antal faktorer, bland annat hur du använder rullstolen, temperaturen och batteriernas ålder. Alla batterier förlorar gradvis kapacitet när de åldras.

Den viktigaste faktorn för batteriernas livslängd är hur ofta de laddas eller urladdas. Om batterispänningsindikatorn visar att batterierna tappar ström snabbare än normalt, kan batterierna vara utslitna och behöva bytas ut.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OBSERVERA: Urladdade batterier</b><br>Om batterierna är helt urladdade ska de laddas så snart som möjligt, eftersom helt urladdade batterier kan förkorta batteriets livslängd. |
|  | <b>OBSERVERA: Ladda batterierna var 3:e månad</b><br>Om batteriet inte kommer att användas under en längre tid rekommenderas att batteriet laddas var 3:e månad.                   |

För att uppnå bästa möjliga livslängd får batterierna aldrig laddas ur helt. Ladda alltid batterierna omedelbart efter att de har laddats ur.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>WARNING: Risk för brand eller explosion - laddningsförhållanden</b><br>Använd endast den laddare som medföljer din rullstol. Om du använder andra laddare kan batterierna, rullstolens elektronik eller själva laddaren skadas. Det kan också leda till att delar blir överhettade, vilket kan medföra ökad risk för brand.                                                                                 |
|   | <b>WARNING: Risk för brand eller explosion - kortslut inte</b><br>Var försiktig när du använder metallföremål vid arbete med batterier. En kortslutning kan lätt orsaka en explosion. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon.                                                                                                                                                                         |
|  | <b>WARNING: Risk för överhettning, gnistor eller kortslutning</b><br>För att avbryta laddningsprocessen ska du dra ut laddkontakten ur eluttaget innan du drar ut laddkontakten ur uttaget i styrenheten, för att undvika gnistbildning och onödigt högt slitage på laddningskontakten.<br>Laddaren kan bli varm och får inte täckas över. Laddaren måste placeras så att den har fritt utrymme på alla sidor. |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Ta bort litiumbatteriet från rullstolen                                             | Installera litiumbatteri                                                             |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORMATION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Batteriets volym beror på vilken rullstol du köper.</li> <li>○ Kontakta din återförsäljare för att köpa batteri enligt individuella behov.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |
| <p>Använd endast <b>endast</b> laddaren <b>laddare</b> som medföljer <b>med</b> din rullstol.</p> | <p>Laddas via uttaget i styrenheten.</p>                                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>OBSERVERA: Ladda batteriet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kontrollera att laddarens kontakt är helt införd i uttaget i styrenheten.</li> <li>○ Om strömmen till rullstolen slås på under laddningsprocessen måste den stängas av igen och laddaren kopplas bort innan rullstolen kan köras.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.12 Övriga presentationer

### 5.12.1 Justera höjden på ryggstödet

|                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |  |
| <p>Lyft upp de 2 spakarna bakom ryggstödet.</p>                                     | <p>Håll i handtaget för att höja eller sänka ryggstödsröret till justera till den höjd som passar dig.</p> | <p>Lås tillbaka röret efter justering</p>                                             |

|                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>MEDDELANDE</b></p> <p>Det är nödvändigt att föraren bekräftar att har låsts.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|



### 5.12.2 Borstad motor och elektromagnetisk broms



Ryggdynan fästs med kardborreband, vilket är enkelt för att demontera och montera.



Ryggremmen fästs med kardborreband, vilket är enkelt för att demontera och montera.



Sittdynan fästs med kardborreband, vilket är lätt att demontera och montera.



Sätesremmen fästs med kardborreband, vilket är enkelt för att demontera och montera.



Vänster motor



Höger motor

Drivenheten består av en elmotor med växellåda och elektromagnetisk broms.



#### **VARNING**

Elektromagnetiska bromsar fungerar endast när rullstolen är i , drivningen hjulet är låst. Den åkande måste stiga ur rullstolen när rullstolen är i handtryckningsläge eller manuellt läge.

Rullstolen är utrustad med två elektromagnetiska bromsar som endast fungerar när rullstolen är i körläge.

### 5.12.3 Klädsel för rygg och säteKörläge



#### FARA

Elektromagnetiska bromsar ska alltid aktiveras efter att rullstolen har skjutits manuellt, särskilt på ojämna ytor och slänter.

### 5.12.4 Positioneringsbälte



#### INFORMATION

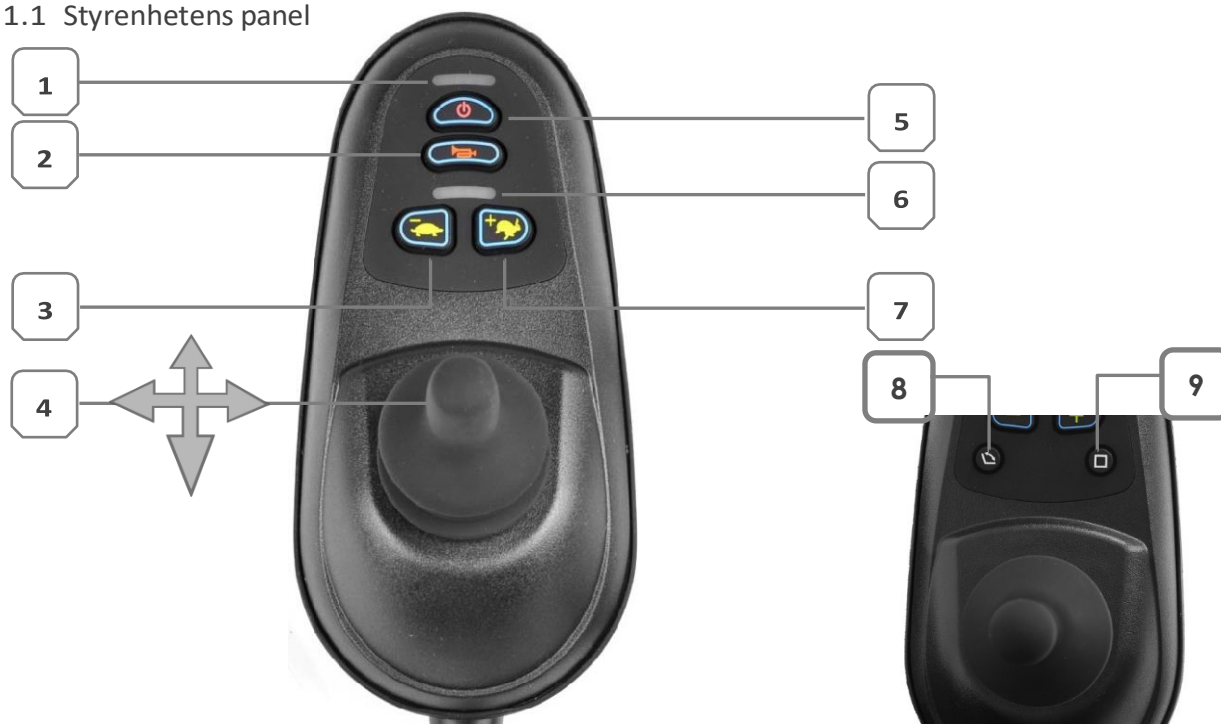
Rullstolen är inte utrustad med bälte, användaren köper efter individuella behov. Var uppmärksam på att köpa tvåpunktsbälte. Se nedan hur du installerar det.

## 6 Styrenhet

### 6.1 Styrenhet (SY-D)

Note: 8 9 only fit for Move Plus

#### 6.1.1 Styrenhetens panel




| Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Namn på huvudkomponenter | Kod                                                                                 | Namn på huvudkomponenter |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Batteriindikator         | 5                                                                                   | Strömknapp På eller Av   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Knapp för signalhorn     | 6                                                                                   | Indikator för hastighet  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minska maxhastigheten    | 7                                                                                   | Öka maxhastigheten       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Joystick                 | 8                                                                                   | Bekräftelseknapp         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strömknapp på eller av   |                                                                                     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Översiktsbilden visar styrenhetens grundläggande funktioner.</li> <li>○ Laddningsuttaget sitter på styrenhetens framsida, detta uttag får endast användas för laddning. Anslutning av andra elektriska apparater kan skada styrsystemet eller påverka rullstolens EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).</li> </ul> |                          |  |                          |

## 7 Transport och förvaring rullstol
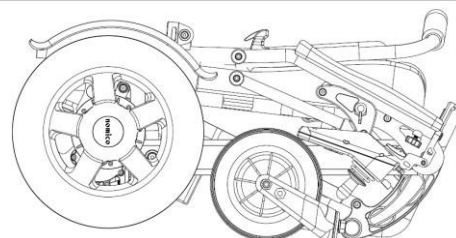
### 7.1 Transport och förvaring rullstol

Om du vill transportera eller förvara rullstolen rekommenderas att du först fäller ihop rullstolen, vilket är bekvämt att bära och tar mindre plats. Dess låga vikt och kompakta storlek är mycket lämpliga för transport och förvaring.



#### FÖRSIKTIGHET

Demonterade eller rörliga delar (t.ex. styrenheten) måste antingen fästas på rullstolen eller tas bort från den och måste vara ordentligt säkrade i fordonet under transporten. Detta för att förhindra att lösa delar eller delar som kan lossna orsakar skador på passagerarna. under transport.

### 7.2 Lufttransport

Flygbolagen har olika regler för transport av rullstolar. Kontakta ditt flygbolag för mer information och för att försäkra dig om att rullstolen kan transporteras på ett säkert sätt.

## 8 Underhåll och reparationer

För att rullstolen ska fungera bra är det viktigt att den används på rätt sätt och underhålls regelbundet. En väl underhållen rullstol håller längre och har lägre risk för defekter.

**MEDDELANDE**

Vissa reparationer kan kräva andra verktyg än de som medföljer rullstolen.

**VARNING**

Stäng alltid av strömmen före underhåll och reparationer.

**8.1 Frekvens för underhåll och inspektion**

Rekommenderar att följande underhålls- och inspektionsschema följs.

| Underhålls- och inspektionsschema                                                                 | Dagliga<br>n | Veckovis | Månadsvis | Årligen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------|
| Kontrollera batterinivåindikatorn och ladda vid behov.                                            | ✗            |          |           |         |
| Kontrollera att styrenheten inte är skadad.                                                       | ✗            |          |           |         |
| Se till att alla löstagbara delar är ordentligt fastsatta.                                        | ✗            |          |           |         |
| Kontrollera däck och fyll på luft vid behov.                                                      |              | ✗        |           |         |
| Om rullstolen är utrustad med lampor och reflexer ska du kontrollera att de fungerar och är rena. |              | ✗        |           |         |
| Rengör rullstolen och klädseln.                                                                   |              |          | ✗         |         |
| Kontrollera klädsel, sitsar och armstöd för slitage.                                              |              |          | ✗         |         |
| Kontrollera att bromshandtaget fungerar som det ska.                                              |              |          | ✗         |         |
| Komplett inspektion, säkerhet kontroll och service utförs av en auktoriserad rullstolshandlare.   |              |          |           | ✗       |

**8.2 Verktyg**

Använd följande verktyg för underhåll och mindre reparationer.

 **INFORMATION:** Olika rullstolar kräver olika verktyg.

|                                                                                    |                                                    |                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Insexnycklar<br>3 mm / 4 mm / 5 mm<br>6 mm / 10 mm |  | Hylsnyckel |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**8.3 Rengöring**

Regelbunden skötsel och underhåll förhindrar onödigt slitage och skador på din rullstol.

**8.3.1 Metalliska ytor**

Tack vare den högkvalitativa pulverlackeringen eller den flytande bakfärgen får ytan ett optimalt

korrosionsskydd. För normal rengöring rekommenderas att använda en mjuk trasa eller svamp tillsammans med vatten och ett mildt rengöringsmedel. Torka sedan försiktigt med en ren trasa och låt ytan lufttorka.

### 8.3.2 Plast

För normal rengöring, tvätta plastytor med en mjuk trasa, mildt rengöringsmedel och vatten. Skölj noga och torka med en mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller slipande köksrengöringsmedel.

### 8.3.3 Klädsel och tyg

För normal rengöring, tvätta klädseln med ljummet vatten och en mild, icke-slipande tvål. Använd en mjuk trasa eller borste. Innan ytan torkar, torka bort eventuella vatten- eller tvålrester med en ren, torr trasa. Upprepa denna procedur för att ta bort envis smuts eller fläckar. Bläckfläckar kan ibland tas bort genom att tvätta med tvål och vatten följt av isopropylalkohol.

## 9 Felsökning

### 9.1 Felsökningsguide

I följande felsökningsguide beskrivs ett antal fel och händelser som kan uppstå när du använder rullstolen, tillsammans med förslag till åtgärder. Observera att guiden inte kan beskriva alla problem och händelser som kan inträffa och att du alltid bör kontakta din återförsäljare.

| Händelse                                  | Möjlig orsak                                                       | Åtgärd                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rullstolen går inte att starta.           | Batterierna är urladdade.                                          | Ladda batterierna.                                                                 |
|                                           | Kabelanslutningen har lossnat.                                     | Kontrollerar alla anslutningar och anslut på nytt                                  |
| Rullstolen är inte körbar.                | Batteriladdaren är ansluten.                                       | Stoppa laddning. Koppla bort från laddningskabeln från rullstolens laddningsuttag. |
|                                           | Rullstolen är i handtryckt läge.                                   | Växla till körläge.                                                                |
| Rullstolen stannar medan den körs driven. | kabel anslutning har kommit lös.                                   | Kontrollerar alla anslutningar och anslut på nytt                                  |
| Rullstolen kan inte laddas.               | -Kabelanslutningen har lossnat eller anslutningen har gått sönder. | Kontrollerar alla anslutningar och anslut på nytt                                  |
|                                           | -Batteriet är gammalt eller skadat.                                | Behöver byta ut batteriet.                                                         |
|                                           | -Laddaren är skadad.                                               | Behöver byta ut laddaren.                                                          |

### 9.2 Felsökningsguide för styrenheten (SY-D)

När du hör fellarmljudet från styrenheten, samtidigt som batteriindikatorlampan blinkar, indikerar det att den elektriska rullstolen är i onormalt skick. Betydelsen av fellarmets status och den rekommenderade avyttringsmetoden visas i tabellen nedan.



| Felindikering | Kort beskrivning felet eller bristen | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ring        | Varning för underspänning            | Batteriet är svagt, vänligen ladda i tid. Om batteriet är fulladdat och fortfarande underspännings larm, betyder det att styrenheten är felaktig.                                                                                                                                                                                                        |
| 2 ringar      | Vänster motor bortkopplad            | Kontrollera om strömkabeln till vänster motor är intakt och kontakten korrekt ansluten, om problemet kvarstår, byt vänster och höger motor och anslut, det betyder att den vänstra motorn är felaktig om det finns 4 ; det betyder att styrenheten är felaktig om det finns 2 ringar .                                                                   |
| 3 ringar      | Fel på vänster broms                 | Kontrollera om det vänstra motorhandtaget är omkopplat körläge, strömkabeln är intakt och kontakten är väl ansluten, om problemet kvarstår, byt vänster och höger motor och anslut, det betyder att den vänstra motorbromsen är felaktig om det finns 5 ; det innebär att styrenheten är felaktig om det finns 3 .                                       |
| 4 ringar      | Höger motor bortkopplad              | Kontrollera om strömkabeln till höger motor är intakt och kontakten korrekt ansluten, om problemet kvarstår, byt vänster och höger motor och anslut, det betyder att höger motor är felaktig om det finns 2 ; det betyder att styrenheten är felaktig om det finns 4 ringar larm.                                                                        |
| 5 ringar      | Fel på höger broms                   | Kontrollera om höger motorhandtag är omkopplat körläge, strömkabeln är intakt och kontakten är väl ansluten, om problemet kvarstår, byt vänster och höger motor och anslut, det betyder att höger motorbroms är felaktig om det finns 3 ; det innebär att styrenheten är felaktig om det finns 5 .                                                       |
| 6 ringar      | Varning för överström                | Stäng av strömmen och växla motorn till körläge, skjut rullstolen för att kontrollera om den kan skjutas smidigt. Om den inte kan skjutas normalt och med motstånd, måste koppla bort styrenheten och motorn, det betyder att motorn är kortsluten om den fortfarande inte kan skjutas, betyder det att styrenheten är felaktig om den kan skjutas lätt. |
| 7 ringar      | Joysticken är inte i utgångsläget    | Stäng av strömmen, släpp joysticken tillbaka till utgångsläget och starta sedan om.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 ringar      | Fel på styrenheten                   | Vänligen kontakta kundtjänst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 ringar      | Varning för överbelastning           | Stäng av strömmen och starta om, och kontrollera att motorn inte har fastnat i främmande föremål eller terräng.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 ringar     | Varning för överspänning             | Stäng av strömmen och koppla bort batterikabeln och koppla sedan in den igen. Om felet kvarstår ska du byta ut styrenheten. eller batteri.                                                                                                                                                                                                               |
| 11 ringar     | Varning för överhettning             | Stäng av strömmen och vänta tills enheterna har svalnat, slå sedan på strömmen och kontrollera om det finns några fel. Om felet fortfarande , vänligen byt ut styrenheten.                                                                                                                                                                               |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>MEDDELANDE</b><br>Stäng av rullstolen och låt den stå i några minuter, starta sedan om rullstolen. Om felet kvarstår måste du stänga av rullstolen och kontakta din återförsäljare. Skriv ner information som visas på kontrollpanelens display och vidarebefordra den till din återförsäljare. |
|  | <b>FÖRSIKTIGHET</b><br>Använd inte rullstolen förrän problemet har åtgärdats eller du har fått andra instruktioner från din serviceleverantör.                                                                                                                                                     |

## 10 Begränsad garanti

| Garantiartiklar | Garantiperiod | Garantiartiklar       | Garantiperiod |
|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Aluminiumram    | 24 månader    | Borstad styrenhet     | 12 månader    |
| Borstad motor   | 12 månader    | Laddare               | 12 månader    |
| Litiumbatteri   | 12 månader    | Icke slitstarka delar | 6 månader     |

(1) Icke delar omfattar följande: däck och slangar till fram- eller bakhjul, sittdyna, rygg- och sätesremmar, ryggklädsel, armstödsdynor, handtag, plastdelar etc.

(2) Denna garanti täcker inte: skador som uppstår till följd av normalt slitage eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll.

(3) Ovanstående garanti ska inte gälla :

- Originaletiketten, som kan visa tillverkningsdatum eller partinummer, har avlägsnats, ändrats eller förstörts;
- Eller om rullstolen har utsatts för försummelse, olycka, felaktigt underhåll eller förvaring, felaktig användning eller missbruk;
- Eller så har rullstolen skadats genom felaktiga reparationer eller har modifierats;
- Eller gratis gåvor.

(4) När garantin har löpt ut debiteras reservdelar, arbete och fraktkostnad.

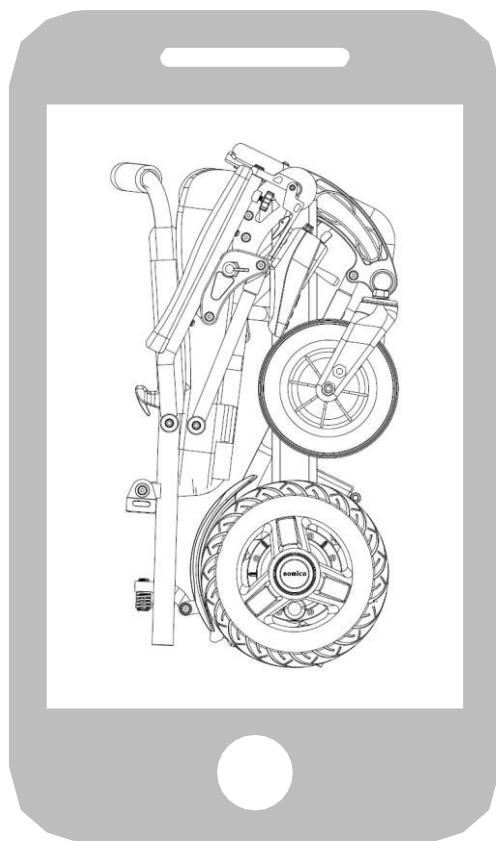
(5) Hållbarheten eller användningstiden för rullstolarna och deras komponenter kan variera beroende på hur ofta de används eller andra faktorer.

(6) Denna garanti är begränsad till den första användaren och kan inte överlåtas.

## 11 Symbolernas betydelse

| Symbol                                                                              | Inledning                                                       | Symbol                                                                              | Inledning                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | UKCA-märkning                                                   |    | Namn och adress till ansvarig person i Storbritannien            |
|    | Tillverkare Namn och adress                                     |    | Läs bruksanvisningen eller läs den elektroniska bruksanvisningen |
|    | Batchkod                                                        |    | Tillverkningsdatum                                               |
|    | Använd till år och månad (Utgångsdatum / Sista förbrukningsdag) |    | Serienummer                                                      |
|    | Varningar och försiktighetsåtgärder                             |    | Referensnummer                                                   |
|    | Förvaras skyddat från solljus                                   |    | Håll dig torr                                                    |
|    | CE-märkning                                                     |    | Behörig företrädare i Europeiska gemenskapen/Unionen             |
|   | Bräcklig, hantera med försiktighet                              |   | Läs bruksanvisningen eller läs den elektroniska bruksanvisningen |
|  | Medicinsk utrustning                                            |  | Unik enhetsidentifierare                                         |
|  | Importör                                                        |  | Distributör                                                      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Information från tillverkaren</b><br>Företaget: SUZHOU IDEAL MEDICAL CO, LTD.<br>Adress: No. 88 Huachi Street, Suzhou Industrial Park<br>No.88 Huachi Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou<br>(215000), Jiangsu, Kina. |
|  | <b>UK Ansvarig person</b><br>Företag: SUNGO Certification Company Limited<br>Adress: 3:e våningen 3:e våningen, 70 Gracechurch Street, London. EC3V 0HR                                                                     |
|  | <b>Europeisk representant: SUNGO Europe B.V. Adress:</b><br><b>Fascinatia Boulevard 522</b> Fascinatia Boulevard 522,<br>Enhet 1.7, 2909VA<br>Capelle aan den IJssel, Nederländerna.                                        |



# BLIMO



[www.blimo.se](http://www.blimo.se)



[www.blimo.dk](http://www.blimo.dk)



[www.blimo.no](http://www.blimo.no)



[www.blimo.fi](http://www.blimo.fi)

NORDBUTIKER AB Tel:  
+46-812350720  
[info@blimo.se/dk/no/fi](mailto:info@blimo.se/dk/no/fi)  
[www.blimo.se/dk/no/fi](http://www.blimo.se/dk/no/fi)

Västra Stockholmsvägen 15  
76231 Rimbo,  
Sverige